

Kurzbeschreibung der Funktionen für PC-Standardtastatur und PC-Maus

F1 = nicht belegt

F2 = Umschaltung Ton/Sprache (nur MA 33 Speech)

F3 = Umschaltung links/rechts

F4 = Verdeckungsrauschen rechter Kanal ein / aus

F5 = Luftleitung

F6 = Knochenleitung (nur Version KL, SISI)

F7 = nicht belegt

F8 = Pulston ein / aus

F9 = Verdeckungsrauschen linker Kanal ein / aus

F10 = nicht belegt

F11 = UCL + MCL (umschalten)

F12 = Unterbrecher/Tongebier-Betrieb

TAB = Umschaltung rechts/links

Strg = Unterbrecher/Tongebier-rechts

R = rechtes Ohr

L = linkes Ohr

B = beidohrig (falls aktiviert)

Alt + B = Programm beenden

Alt + E = Einstellen

Alt + R = Bearbeitung

Alt + T = Siebtest

Alt + U = Markiert unsichere Hörschwelle

Leertaste = Unterbrecher/Tongebier der aktiven Seite

Alt + L = Messung löschen (GDT&MAICO)

Alt + N = Neu (NOAH)

Alt + D = vorhandene Messung laden

Alt + S = Messung speichern

Speichert den aktuellen Messwert

Unterbrecher/Tongebier

Pegel- und Frequenzanwahl

Druck = sofortiger Ausdruck

? = markiert unsichere Hörschwelle
Pegeländerung Gegenohr

Pos1 = Rücksprung auf 1 kHz

Pegeländerung Gegenohr
Entf = letzten Messwert löschen

Pegeländerung Messoohr

SISI – Test (nur Version SISI)

S = Stopp (Player)

P = Start (Player)

E = Ende (nur SISI-Test)

Frequenzumschaltung

Messwerte übernehmen

N = nicht gehört

Strg = Unterbrecher/Tongebier links