

1 ÜBER DIESE KURZANLEITUNG



Diese Kurzanleitung ist nicht als Ersatz für das Benutzerhandbuch gedacht. Das Lesen des gesamten Benutzerhandbuchs vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist zwingend erforderlich! Einige der folgenden Funktionen können je nach den vorgenommenen Einstellungen variieren.

2 ZWECK & EINRICHTUNG

Der BERAphone® Hardware Tester kann verwendet werden, um die Funktionstüchtigkeit der BERAphone®-Elektroden zu überprüfen.

WICHTIG: Nehmen Sie das Ohrpolster vom BERAphone® ab, damit ein optimaler Kontakt erreicht wird.

Platzieren des BERAphone® sicher auf dem Hardware Tester



- ✓ Verbinden Sie die BERAphone®-Elektroden mit dem Hardware Tester.
- ✓ Halten Sie den Hardware Tester mit etwas Druck, um sicherzustellen, dass er guten Kontakt zum BERAphone® hat.

Vorbereiten des Geräts




Einschalten des Geräts

- ✓ Drücken Sie die **Home**-Taste auf dem easyScreen, um es einzuschalten.


Schnelltest auswählen

- ✓ Berühren Sie die Schaltfläche **Schnelltest**, um den Testbildschirm zu öffnen.

3 STARTEN DES HARDWARETESTS

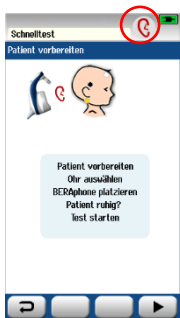

Wählen Sie das Ohr


- ✓ Wenn der Testbildschirm angezeigt wird, berühren Sie die **Ohr**-Taste , bis das Symbol für das zu testende Ohr angezeigt wird. **Rot = Rechts. Blau = Links** (1).

Beginnen Sie mit dem Screening

- ✓ Berühren Sie die **Test**-Schaltfläche , um mit dem Screening zu beginnen.

4 ABLAUF DES HARDWARETESTS

Impedanztest

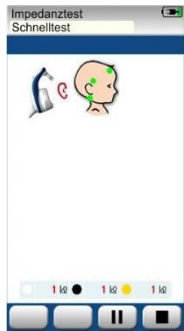

- ✓ Der Kontakt der Elektroden mit dem Hardware Tester (Impedanz) wird überprüft.
- ✓ Farbige Kreise auf der Babykopfgrafik spiegeln den Status wider:
 - **Grün** = akzeptable Impedanz
 - **Gelb** = unzulässige Impedanz
- ✓ Wenn ein Kreis gelb ist, überprüfen Sie den Kontakt zwischen den Elektroden und dem Hardware Tester.
 - Wenn das BERAphone® ordnungsgemäß funktioniert, sollten alle Kreise grün sein.
 - Wenn die Kreise bei gutem Kontakt **gelb** bleiben, kann es zu einem Problem mit Ihrem BERAphone® Gerät kommen.
- ✓ Wenn die Impedanz für alle drei Elektroden akzeptabel ist, startet der Test automatisch.

ABR-Messung



- ✓ Das vertikale Balkendiagramm sollte auf einem niedrigen Niveau bleiben.
 - Der **rote** Balken zeigt den Fortschritt des Tests für das **rechte** Ohr an.
 - Der **blaue** Balken zeigt den Fortschritt des Tests für das **linke** Ohr an.
- ✓ Der Test sollte 3 Minuten lang fortgesetzt werden, ohne dass ein ABR erkannt wird – Anzeige eines „Auffällig“-Ergebnis, bei dem der Test mit dem Symbol **X** endet.

5 HÖRPROBE

Sicherstellen, dass der Reiz vorhanden ist

Wenn der Test nach Abschluss des Impedanztests läuft, nehmen Sie das BERAphone® aus dem Hardware Tester und hören Sie den Stimulus, um sicherzustellen, dass er hörbar ist (Sie müssen über ein gutes Gehör verfügen).

- ✓ Wenn das Verhalten des BERAphone® den oben beschriebenen Erwartungen entspricht, funktioniert das BERAphone® einwandfrei.

6 FOLGEPRÜFUNG

- ✓ Bleibt die Impedanz **gelb**, erhält der Test ein „Unauffällig“-Ergebnis oder ist der Reiz nicht hörbar, wenden Sie sich an MAICO oder Ihren lokalen MAICO-Vertreter, um die Wartung Ihres Gerätes zu veranlassen.
- ✓ Wenn das Verhalten des BERAphone® den oben beschriebenen Erwartungen entspricht, funktioniert das BERAphone® einwandfrei.