

## 1 INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA D'USO RAPIDO



Con questa guida d'uso rapido non si intende sostituire il manuale d'uso. La lettura dell'intero manuale d'uso prima dell'utilizzo del dispositivo è obbligatoria!  
Alcune delle seguenti funzioni possono variare a seconda delle impostazioni personalizzate.

## 2 SCOPO E CONFIGURAZIONE

Il BERAphone® Hardware Tester (dispositivo di prova dell'hardware BERAphone®) può essere utilizzato per controllare l'integrità degli elettrodi BERAphone®.


**IMPORTANTE:** Rimuovere il cuscinetto auricolare di BERAphone® per ottenere un contatto ottimale!

### Posizionare il BERAphone® sul Hardware Tester



- ✓ Gli elettrodi BERAphone® devono essere collegati all'Hardware Tester.
- ✓ Collegare il Hardware Tester con pressione per assicurarsi che abbia un buon contatto con il BERAphone®.

### Preparare il dispositivo

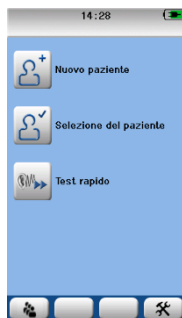


#### Accendere il dispositivo

- ✓ Premere il tasto **Home** sull'easyScreen per accenderlo.


#### Selezionare il Test rapido

- ✓ Toccare il tasto **Test rapido** per aprire la schermata di test.

## 3 INIZIARE IL TEST DELL'HARDWARE

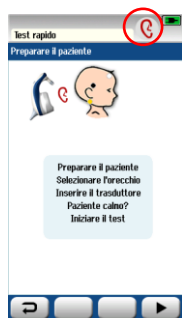

### Scegliere l'orecchio


- ✓ Quando viene visualizzata la schermata di test, toccare il tasto **Orecchio**  fino a visualizzare il simbolo dell'orecchio da esaminare. **Rosso = Destra. Blu = Sinistra** (1).

### Iniziare lo screening

- ✓ Toccare il tasto  **Test** per iniziare lo screening.


## 4 PROCESSO DI CONTROLLO DELL'HARDWARE

### Controllo impedenza

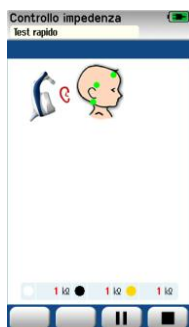

- ✓ Il sistema controlla automaticamente il contatto degli elettrodi con la pelle (impedenza).
- ✓ I cerchi colorati sulla grafica della testa del bambino mostrano lo stato:
  - Verde = impedenza accettabile
  - Giallo = impedenza inaccettabile
- ✓ Se alcuni cerchi sono gialli, controllare il contatto tra gli elettrodi ed il Hardware Tester.
  - Se il BERAphone® funziona correttamente, tutti i cerchi dovrebbero essere verdi.
  - Se i cerchi rimangono Gialli con un buon contatto, potrebbe esserci un problema con il dispositivo BERAphone®.
- ✓ Quando l'impedenza è accettabile per tutti e tre gli elettrodi, il test inizia automaticamente.

### Misurazione ABR

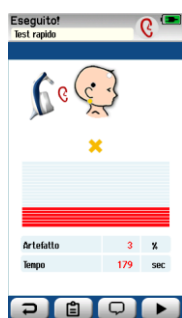

- ✓ Un grafico a barre verticale dovrebbe rimanere ad un livello basso.
  - La barra Rossa mostra l'avanzamento del test per l'orecchio Destro.
  - La barra Blu mostra l'avanzamento del test per l'orecchio Sinistro.
- ✓ Il test dovrebbe durare 3 minuti senza rilevare un ABR - mostrando un risultato Refer (Non superato), in cui il test si ferma con il simbolo X.

## 5 CONTROLLO DELL'UDITO

### Assicurarsi che lo stimolo sia presente

Durante un test, dopo il test dell'impedenza, rimuovere il BERAphone® dall'Hardware Tester e ascoltare lo stimolo per assicurarsi di poterlo sentire (è necessario avere un buon udito).

## 6 TEST SUCCESSIVO

- ✓ Se l'impedenza rimane Gialla, se il test viene superato o se lo stimolo non si sente, contattare MAICO o il rappresentante locale di MAICO per organizzare la manutenzione del dispositivo.
- ✓ Se il funzionamento del BERAphone® corrisponde alle aspettative descritte precedentemente, il BERAphone® funziona correttamente.