

## 1. О ДАННОМ КРАТКОМ РУКОВОДСТВЕ




Данное краткое руководство не заменяет полноценной инструкции по эксплуатации. Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства!

Некоторые нижеописанные функции могут отличаться от фактических из-за индивидуальных настроек.

## 2. ОПИСАНИЕ

Устройства MA 25 / MA 25e / MA 27 / MA 27e представляют собой аудиометры для тональной аудиометрии с воздушным звукопроводением. В устройствах MA 25e и MA 27e к функциям MA 25/MA 27 добавлен автоматический тест порога слышимости Хьюсона-Вестлейка, а также функции микрофона врача и передачи результатов на ПК.

## 3. ФУНКЦИИ И КНОПКИ

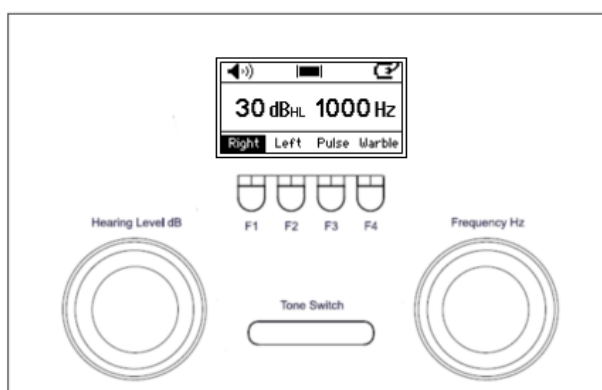

Название (я)/функция (-и)	Описание
<b>Включение</b>	Нажмите <b>Tone Switch (переключатель тона)</b> Внимание! Подавать питание на устройство разрешается, только если наушники подсоединены!
<b>Выключение</b>	Нажмите регулятор <b>Hearing Level dB (Порог слышимости, дБ)</b> и регулятор <b>Frequency Hz (Частота, Гц)</b> .
<b>Tone Switch (Переключатель тона)</b>	Нажмите, чтобы подать сигнал. На экране появится значок подачи сигнала (например,  ).
<b>Hearing Level dB (Порог слышимости, дБ)</b>	Вращайте регулятор для выбора громкости подаваемого тона.
<b>Frequency Hz (Частота, Гц)</b>	Вращайте регулятор для выбора частоты подаваемого тона.


### Функциональные кнопки MA 25/MA 27

F1	F2	F3	F4
Выберите <b>Right (Правое)</b> ухо	Выберите <b>Left (Левое)</b> ухо	<b>Pulse (Пульсирующий)</b> Вкл./Выкл.	<b>Warble (Трель)</b> Вкл./Выкл.

### Функциональные кнопки MA 25e/MA 27e

F1	F2	F3	F4
Переключение между <b>Right (Правым)</b> и <b>Left (Левым)</b>	<b>Store (Сохранить)</b> пороговое значение	<b>Pulse (Пульсирующий)</b> Вкл./Выкл.	<b>Warble (Трель)</b> Вкл./Выкл.

## 4. ДИСПЛЕЙ

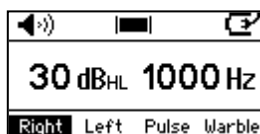

Тон подается (включен).



Тон не подается (выключен).



Кнопка ответа пациента активирована (нажата).



Кнопка ответа пациента не активирована (не нажата).



Устройство подключено к источнику питания.



Если устройство питается от батарей, значок батареи изменяется в зависимости от уровня их заряда.



Если заряд батарей заканчивается, на экране отображается «**Низкий заряд батареи**» **Low Ba**, и значок мигает.

## 5. МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Чтобы перейти в меню настройки, одновременно нажмите клавиши F1 и F4 и удерживайте нажатыми 2–3 секунды.

F1	F2	F3	F4
<b>Change</b> (Изменение) настройки	Переход вверх (↑) в меню настройки	Переход вниз (↓) в меню настройки	<b>Save</b> (Сохранить) настройки и выйти из меню настройки

## 6. ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ MA 25e/MA 27e

- 1. Микрофон оператора) Talk F:** Удерживайте нажатым регулятор **Порог слышимости, дБ)Hearin**, чтобы включить «Микрофон врача». Чтобы отрегулировать громкость микрофона врача, нажмите и вращайте регулятор **Порог слышимости, дБ)Hearin**.

Нажмите регулятор частоты, чтобы активизировать это меню.



- 2. Специальные функциональные кнопки MA 25e/MA 27e:**

F1	F2	F3	F4
<b>Delete</b> (Удалить все) пороги слышимости, сохраненные на устройстве	Сохранение пороговой точки <b>Not Heard</b> (не слышно)	Отображение <b>Threshold</b> (порогов) слышимости, сохраненные на устройстве	Запуск автоматического теста Хьюсона-Вестлейка (HW)

- 3. Передача данных на ПК** Для передачи данных на ПК необходима программа **MAICO Sessions**. Указания по надлежащей установке и передаче данных см. в инструкции по эксплуатации.