

1 OM DENNA SNABBGUIDE




Denna snabbguide är inte avsedd att ersätta bruksanvisningen. Du måste även läsa hela bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk!

Vissa av följande funktioner kan variera beroende på de individuella inställningarna.

2 BESKRIVNING

MA 25 / MA 25e / MA 27 / MA 27e är audiometrar för ren ton och ledning via luften. MA 25e och MA 27e utökar funktionerna i MA 25/MA 27 med automatiskt Hughson-Westlake hörtröskeltest, Talk Forward-funktion för att tala med patienten samt överföring av resultat till en dator.

3 KNAPPARNAS FUNKTION

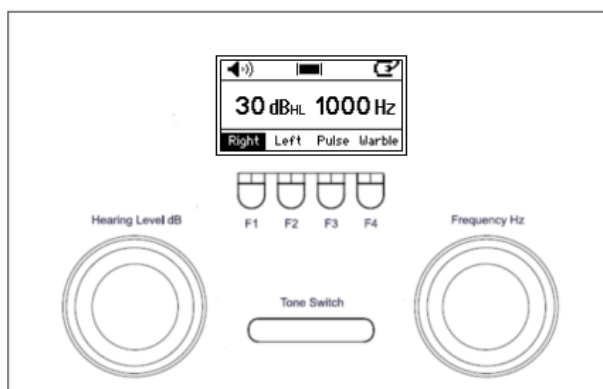

Namn / Funktion(er)	Beskrivning
Ström på	Tryck på tontangenten
Ström av	Observera: Det går bara att starta enheten om hörlurarna är helt anslutna!
Tone Switch (Tontangent)	Tryck på Hearing Level dB (Ljudnivå) och Frequency Hz (Frekvens) samtidigt.
Hearing Level dB (Hörselnivå dB)	Tryck för att presentera signalen. En tonpresentationssymbol (🔊) visas på skärmen.
Frequency Hz (Frekvens i Hz)	Vrid för att välja hörselnivå för den presenterade tonen.
Frequency Hz (Frekvens i Hz)	Vrid reglaget för att välja frekvens för den presenterade tonen.


Funktionsknappar på MA 25 / MA 27

F1	F2	F3	F4
Välj höger öra	Välj vänster öra	Puls På/Av	Warble (Frekvensmodulering) På/Av

Funktionsknappar MA 25e / MA 27e

F1	F2	F3	F4
Växla mellan höger och vänster	Lagra tröskel-värde	Puls På/Av	Warble (Frekvensmodulering) På/Av

4 DISPLAY

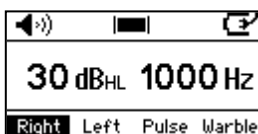

Tonen presenteras (aktiv).



Tonen presenteras inte (avstängd).



Omkopplaren för patientrespons är aktiverad (intryckt).



Omkopplaren för patientrespons är inte aktiverad (inte intryckt).



Enheten är ansluten till en strömkälla.



När den drivs av batterier ändras batterisymbolen beroende på batteriets effektnivå.



När batterierna börjar ta slut visas texten **Low Battery (Svagt batteri)** och blinkar.

5 INSTÄLLNINGSMENY

För att komma till inställningsmenyn trycker du på F1 och F4 samtidigt i 2-3 sekunder.

F1	F2	F3	F4
Ändra inställning	Bläddra uppåt (↑) i inställningsmenyn	Bläddra nedåt (↓) i inställningsmenyn	Spara inställningarna och lämna inställningsmenyn

6 SPECIALFUNKTIONER I MA 25e / MA 27e

- Talk Forward:** Håll ner ratten **Hearing Level dB (Hörselnivå)** för att aktivera Talk Forward (Tala med patient). Om du vill justera ljudnivån vid tal med patienten håller du ned och vrider på **Hearing Level dB** -reglaget.

Tryck ner frekvensratten för att aktivera den här menyn.



- Specialfunktionsknappar MA 25e / MA 27e:**

F1	F2	F3	F4
Ta bort alla hörseltröskelvärden som är lagrade i enheten	Spara ett tröskelvärde för Not Heard (hördes inte)	Visa tröskelvärden för hörsel som finns lagrade i enheten	Starta automatiskt Hughson-Westlake (HW) -test

- PC-överföring:** För att överföra data till en dator krävs **MAICO Sessions**. Läs igenom bruksanvisningen för korrekta installations- och överföringsinstruktioner.