

1 OVER DEZE SNELGIDS



Deze snelgids is niet bedoeld om de bedieningshandleiding te vervangen. Het lezen van de hele bedieningshandleiding voordat het apparaat wordt gebruikt, is verplicht!
Sommige van de volgende functies kunnen verschillen naargelang de individuele instellingen.

2 VOORBEREIDING VOOR HET TESTEN

Een rustige ruimte is het beste voor een gehoorscreening.

- ✓ Stop met praten, zet televisies en andere akoestische geluidsbronnen uit, sluit de deur voor lawaai van buiten.

Is de timing juist?


- ✓ Hoe langer u kunt wachten met het screenen van een pasgeborene, hoe groter de kans op een goed resultaat. Vermijd testen gedurende de eerste 12 uur na de geboorte.
- ✓ Screening is het meest succesvol als de baby net gevoed is en lekker ligt te slapen.

Plaats het oorstukje op de standaard OAE-sonde of de SnapPROBE™




- ✓ Zorg dat de sonde en alle onderdelen ervan schoon zijn.
- ✓ Kies een wegwerpoorstukje dat past in de gehoorgang van de patiënt.
- ✓ Sluit het oorstukje aan op de sonde.

Steek de sonde met oorstukje in het oor

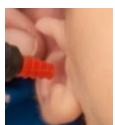

- ✓ Plaats de sonde stevig in de gehoorgang van de baby.
- ✓ Zorg dat de sonde diep genoeg is ingestoken, zodat deze er niet eenvoudig uitvalt.

3 PREPAREER HET APPARAAT

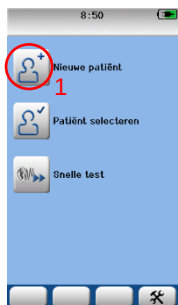


Schakel het apparaat in

- ✓ Druk op de knop **Start** van de easyScreen om deze in te schakelen.

Voer een nieuwe patiënt in

- ✓ Tik op de knop **Nieuwe patiënt** om een gegevensinvoerscherm te openen (1).

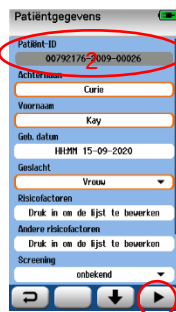

Voer patiëntgegevens in

- ✓ Tik op de velden om de gegevens van de patiënt in te voeren.
- ✓ U moet een Patient ID (patiënt-ID) invoeren om de patiënt op te slaan (2).
- ✓ Druk op de knop **Test** nadat de gewenste velden zijn ingevuld (3).

4 START DE SCREENING



Kies het oor

- ✓ Tik wanneer het testscherm wordt weergegeven op de knop **Oor** totdat het symbool verschijnt voor het oor dat u wilt testen. **Rood = rechts. Blauw = links.** (4).


Is de baby er klaar voor?

- ✓ Wacht met de test tot de baby rustig en kalm is.

Start de screening


- ✓ Tik op de knop **Test** om de screening te starten (5).

5 SCREENINGPROCEDURE – CONTROLE VAN DE PASSING VAN DE SONDE

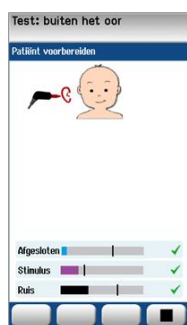

- ✓ De passing van de sonde in de gehoorgang wordt gecontroleerd.
- ✓ Tekst in de statusbalk bovenaan beschrijft de status van de sondepassing. De balken eronder geven aan:
 - ✓ **Afgesloten** – of de sonde goed in de gehoorgang past.
 - ✓ **Stimulus** – of de prikkel toereikend is.
 - ✓ **Ruis** – of er overmatige akoestische ruis is.
- ✓ Als er parameters zijn zonder groene vinkje erachter, dan:
 - ✓ Controleer of de sonde goed in de gehoorgang is geplaatst.
 - ✓ Controleer of het lawaai in de ruimte en van de patiënt is verminderd.
- ✓ Wanneer alle 3 parameters groene vinkjes hebben, gaat de test naar de volgende fase.


6 SCREENINGSPROCES – MEETFASE

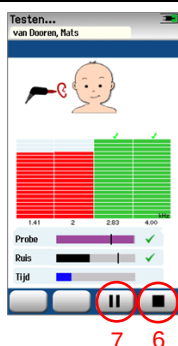

- ✓ De verticale balken voor elke frequentie worden met kleur gevuld naarmate de test vordert.
- ✓ **Rode** balken geven de voortgang van de screening aan voor een test op het **rechteroor**.
- ✓ **Blauwe** balken geven de voortgang van de screening aan voor een test op het **linkeroor**.
- ✓ Een groene balk met een vinkje erboven geeft een frequentieband aan waarvoor de test is geslaagd.
- ✓ Wanneer 3 frequentiebanden geslaagd zijn, dan is de algemene test **geslaagd**; de test stopt en er wordt een groen ✓-symbool weergegeven boven het diagram.
- ✓ Wanneer er 60 seconden verstrijken zonder dat er een OAE wordt gedetecteerd (**Verwijzen**), stopt de test en wordt een oranje X-symbool weergegeven boven het diagram.
- ✓ Druk op de knop **Stop** (6) om een stop te forceren (6). Het symbool voor een onvolledige test (?) wordt weergegeven.
- ✓ Selecteer de knop **Pauze** (7) om de meting te pauzeren (7). Ga vervolgens verder wanneer u er klaar voor bent.

7 OPTIES NA DE TEST

Etiket afdrukken

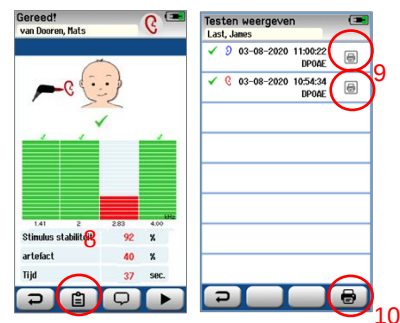

- ✓ Selecteer de knop **Testlijst** (8) voor een lijst van uitgevoerde tests voor deze patiënt (8).
- ✓ De meest recente test voor het linker- en rechteroor is voorgeselecteerd (aangevinkt) om af te drukken. Deze kan worden gedeselecteerd en andere kunnen worden gekozen door op het printerpictogram te tikken op de testrij (9).
- ✓ Nadat u de tests heeft geselecteerd die u wilt afdrukken, drukt u op de knop **Afdrukken** (10) (zorg dat de printer is ingeschakeld) (10).

Terug naar Start

- ✓ Druk op de knop **Start** om terug te keren naar het scherm **Start** en het proces te starten voor een nieuwe patiënt.

Overdracht naar HearSIM™

- ✓ Sluit de easyScreen aan op uw pc en start de HearSIM™-toepassing om de patiënt- en testgegevens over te dragen voor permanente opslag. Raadpleeg de HearSIM™-handleiding voor meer informatie.