

1 OM DEN HÄR SNABBGUIDEN



Denna snabbguide är inte avsedd att ersätta bruksanvisningen. Du måste även läsa hela bruksanvisningen innan enheten tas i bruk!
Vissa av följande funktioner kan variera beroende på de individuella inställningarna.

2 TESTFÖRBEREDELSE

Ett tyst rum är bäst för hörselscreening.

- ✓ Prata inte, stäng av TV-apparater och andra ljudkällor, och stäng dörrarna så att utomhusbuller inte tränger in.

Är tidpunkten rätt?


- ✓ Ju längre du kan vänta med screening av en nyfödd, desto bättre är sannolikheten för resultatet **Godkänt**. Undvik provning under de första 12 timmarna efter födseln.
- ✓ Screening får bästa resultat när barnet har precis matats och sover nöjt.

Fäst öronproppen på standard-OAE-proben eller på SnapPROBE™




- ✓ Kontrollera att proben och alla dess delar är rena.
- ✓ Välj en öronpropp för engångsbruk som passar patientens hörselgång.
- ✓ Anslut öronproppen till proben.

För in proben med öronproppen i örat

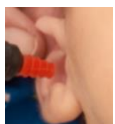

- ✓ Placera proben säkert i barnets hörselgång.
- ✓ Kontrollera att proben sitter tillräckligt djupt så att den inte faller ut för lätt.

3 FÖRBERED ENHETEN

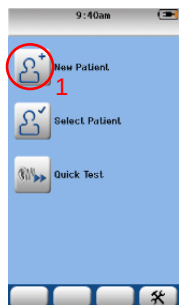


Starta enheten

- ✓ Tryck på knappen **Home (Hem)** på easyScreen för att starta enheten.

Ange en ny patient


- ✓ Tryck på knappen **New Patient (Ny patient)**  så öppnas skärmbilden för datainmatning (1).

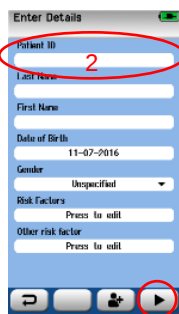

Ange patientinformation

- ✓ Rör vid fälten för att ange patientens information.
- ✓ Du måste ange ett patient-ID för att spara patienten (2).
- ✓ Rör vid funktionsknappen **Test**  när du har fyllt i önskade fält (3).

4 BÖRJA SCREENINGEN

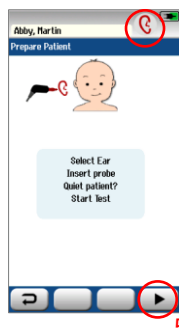

Välj öra

- ✓ När testskrämbilden visas rör du vid knappen **Ear (Öra)**  tills den visar symbolen för det öra där provningen ska göras. **Röd = höger. Blå = Vänster.** (4).


Är barnet redo?

- ✓ Påbörja inte testet förrän barnet är lugnt och tyst.

Börja screeningen


- ✓ Tryck på funktionsknappen **Test**  för att börja screeningen (5).

5 SCREENINGPROCESS – KONTROLL PROBENS PASSFORM

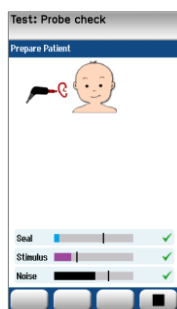

- ✓ Probens passform i hörselgången kontrolleras. Texten i det övre statusfältet beskriver probens passformsstatus. Staplar nedan visar:
 - ✓ **Seal (Tätning)** – om proben sitter tätt och säkert i hörselgången.
 - ✓ **Stimulus** – om en stimulus är tillräcklig.
 - ✓ **Noise (Störningar)** – om överdrivna akustiskt buller förekommer.
- ✓ Om några parametrar inte har någon grön bockmarkering sist:
 - ✓ Kontrollera att proben sitter tätta och säkert i hörselgången.
 - ✓ Sänk ljudnivån i rummet och från patienten.
- ✓ När alla 3 parametrarna har gröna bockmarkeringar går testet vidare till nästa fas.


6 SCREENINGPROCESS – MÄTFAS

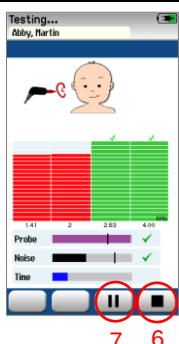

- ✓ Lodräta staplar för varje frekvens fylls med färg när testet fortsätter.
 - ✓ **Röda** staplar visar screeningens förlopp för **höger** öra.
 - ✓ **Blå** staplar visar screeningens förlopp för **vänster** öra.
 - ✓ Ett grönt fält med en bockmarkering ovanför representerar ett godkänt frekvensband.
- ✓ När 3 frekvenser godkänns räknas den testet som **Pass (Godkänd)**, varefter provningen stoppas och en grön ✓ symbol visas ovanför kurvan.
- ✓ När 60 sekunder har passerat och ingen OAE har detekterats (**Refer (Remittera)**) avslutas testet och en orange X symbol visas ovanför kurvan.
- ✓ Du kan forcera ett stopp genom att trycka på funktionsknappen **Stopp** (6). Symbolen för ett ofullständig test (?) visas.
- ✓ Du kan göra paus i mätningen genom att trycka på knappen **Paus** (7). Fortsätt när du är klar.

7 ALTERNATIV EFTER GENOMFÖRT TEST

Utskriftetikett

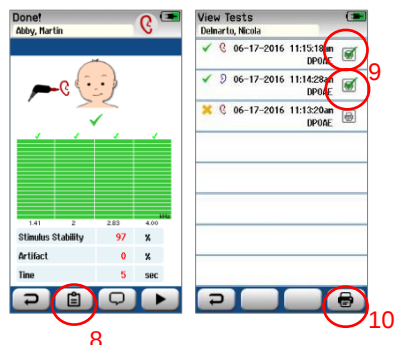

- ✓ Tryck på knappen **Lista över test** (9) så visas listan över de test som har utförts för patienten (8).
- ✓ Det senast genomförda testet för vänster och höger öra är förvald (markerad) för utskrift. Du kan avmarkera denna och andra markerade alternativ genom att trycka på skrivarikonen (10).
- ✓ När du har valt de provningar som ska skrivas ut trycker du på knappen **Skriv ut** (8) (kontrollera att skrivaren är på) (10).

- ✓ Återgå (hemknapp) Tryck på knappen **Hem** för att återgå till **Hem**-skärmbilden och starta processen för en ny patient.

Överför till HearSIM™

- ✓ Anslut easyScreen till din dator och starta HearSIM™ för att överföra patient- och testdata till permanent lagring. Se bruksanvisningen för HearSIM™ för mer information.