

Mittauksen valmistelu

Käynnistä laite painamalla joko punaista tai sinistä nuolipainiketta   .
Jos säilytät easyTympin telakassa, se menee päälle automaattisesti, kun irrotat sen telakasta.

Korvatippien käsittely

Valitse korvatipeistä sopivan kokoinen tippi korvakäytävän ja korvan koon sekä muodon mukaan. Laita korvatippi tiukasti mittapään kärkeen.

Käyttöpaneeli



Toimintopainikkeet:

- Yläpainikkeet: Painikkeiden toiminta liittyy näytössä kunkin toimintopainikkeen yläpuolella näkyvään toimintoon (esim. Select Test (Valitse testi), Patient (Potilas), Stop (Pysäytä)).

  Nuolipainikkeet: easyTymp kytketään päälle painamalla oikeaa tai vasenta nuolipainiketta.
easyTymp kytketään pois päältä painamalla molempia painikkeita samaan aikaan.

  Ylös- ja alas-painikkeet: Näillä voit selata easyTympin asetusvalikoita tai testiprotokollia ja liikkua näytössä ylös- tai alaspäin.

Testin käynnistäminen

easyTympin käynnistyessä esiin tulee testinäyttö valmiina mittauksen aloittamiseen. Käytössä on sama protokolla kuin edellisen mittauksen aikana.

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

Select Test

Patient

Stop

Kun Test (Testi) -näyttö tulee esiin, käytössä olevan protokollan nimi näkyy toisella rivillä.

Avaa käytettävissä olevien testiprotokollien näytön.

Avaa näytön, jossa voit tallentaa tiedot joko olemassa olevalle potilaalle, joka ladataan tietokannasta, tai uudelle asiakkaalle.


Paina Stop (Pysäytä), kun haluat päättää mittauksen.

Mittauksen päätyttyä easyTymp siirtyy automaattisesti Done (Valmis) -näyttöön.

Näytöt

Test: Ready

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

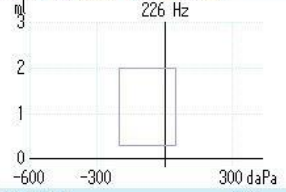

Volume ml

Compliance ml

Pressure daPa

Gradient daPa

Select Test Patient Stop

Painamalla Select Test (Valitse testi) voit ladata toisen protokollan. Painamalla Patient (Potilas) saat esiin potilasluettelon.

Select Test

01 Tymp 226Hz

02 Tymp 1kHz

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

04 Tymp 226Hz + Reflex 90dB

05 Tymp 1kHz + Auto Reflex

06 Tymp 1kHz + Reflex 80dB WB

easyTymp Select

Valitse testi liikkumalla ylös/alas, ja aloita mittaus painamalla Select (Valitse).

View Patients

☐ Andy Andrews

☒ John Doe

☐ Dick Solomon

Back Details Result


Valitse potilas liikkumalla ylös/alas. Painamalla Result (Tulos) voit katsella tallennettuja tuloksia.

Mittaustietojen hallinta

Mittauksen päätyttyä easyTymp siirtyy automaattisesti Done (Valmis) -näyttöön. Done (Valmis) -näytössä voidaan katsella, tulostaa ja/tai tallentaa kummankin korvan mittauksia.

Done!

Tympanogram

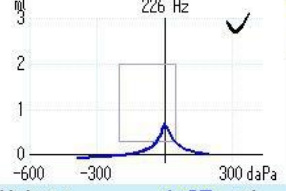

Volume 1.65 ml

Compliance 0.67 ml

Pressure -1 daPa

Gradient 69 daPa

Print Save Delete

Vieritä alas nähdäksesi tulokset.

Select Pat. & Save

☐ New Patient: Number 4

☒ Andy Andrews

☒ John Doe

☒ Dick Solomon

Back Edit New Save

Tallenna tiedot olemassa olevalle tai uudelle.

Edit New

ID

First Name

Last Name

Birth Date DD : MM : YYYY

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - *

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Save Select Next

Ylös- ja alas-painikkeet siirtävät näppäimistön valintaa yhden merkin verran ylös- tai alaspäin. Syntymäaikaa muokattaessa ylös- ja alas-painikkeet muuttavat numeroarvoa.