

1 BU HIZLI KILAVUZ HAKKINDA



Bu Hızlı Kılavuz, kullanma kılavuzunun yerini almak üzere tasarlanmamıştır. Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tümüyle okunması zorunludur! Aşağıdaki işlevlerden bazıları, yapılan bireysel ayarlara göre değişiklik gösterebilir.

2 TEST İÇİN HAZIRLIK

İşitme Taraması İçin Sessiz Bir Oda En İyisidir.

- ✓ Televizyon ve diğer akustik gürültü kaynaklarını kapatın. Dış gürültüye karşı bulunduğunuz odanın kapısını kapalı tutun. Test süresince konuşmayın.

Zamanlama doğru mu?

- ✓ Yenidoğan taraması için ne kadar uzun süre beklerseniz, **Geçti** sonucu olasılığı o kadar yüksek olur. Doğumdan sonraki 12 saatten önce test yapmaktan kaçının.
- ✓ Tarama, bebeğin yeni beslenmiş ve rahat bir şekilde uyuyor olduğu zaman en başarılı şekilde gerçekleşir.

Standart OAE Probu veya SnapPROBE™ üzerine uygun ucu yerleştirin



- ✓ Probu ve tüm parçalarının temiz durumda olduğundan emin olun.
- ✓ Hastanın kulak kanalına uyacak tek kullanımlık bir kulak ucu seçin.
- ✓ Kulak ucunu proba takın.

Probu Kulak Kanalına Yerleştirin



- ✓ Probu bebeğin kulak kanalına güvenli bir şekilde yerleştirin.
- ✓ Probu kolay düşmemesi için yeterince derine yerleştirildiğinden emin olun.

3 CİHAZI HAZIRLAYIN



Cihazı Açın

- ✓ Açmak için easyScreen üzerindeki **Ana** Ekran düğmesine basın.

Yeni Bir Hasta Girin


- ✓ Bir veri giriş ekranı açmak için **Yeni Hasta** simgesine dokununuz (1).



Hasta Bilgilerini Girin

- ✓ Hasta bilgilerini girmek için alanlara dokununuz.
- ✓ Hastayı kaydetmek için bir Hasta Numarası girmelisiniz (2).
- ✓ İstenen alanlar tamamlandığında **Test** fonksiyon tuşuna dokununuz (3).

4 TARAMAYA BAŞLAYIN

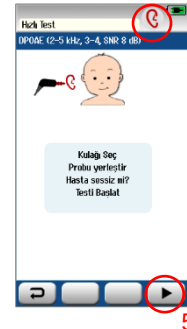

4 Kulak Tarafını Seçin

- ✓ Test ekranında, test etmek istediğiniz kulağın sembolü görüntülenene kadar Kulak simgesine dokununuz. **Kırmızı = Sağ. Mavi = Sol.** (4).


Bebek Hazır mı?

- ✓ Bebek sakinleşene ve sessizleşene kadar teste başlamak için bekleyin.

Taramaya Başlayın


- ✓ Taramayı başlatmak için **Test** fonksiyon tuşuna dokununuz (5).

5 TARAMA SÜRECİ - PROB KONTROLÜ

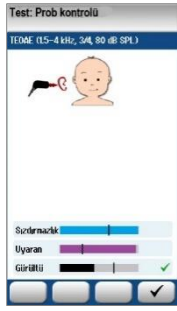

- ✓ Proben kulak kanalına yerleşimi kontrol edilir.
 - ✓ Üst durum çubuğundaki metin prob yerleşim durumunu açıklar. Çubuklar ise aşağıdaki durumları gösterir:
 - ✓ **Sızdırmazlık** - probun kulak kanalına güvenli bir şekilde oturup oturmadığı.
 - ✓ **Uyaran** - uyaranın yeterli olup olmadığı.
 - ✓ **Gürültü** - akustik gürültü olup olmadığı.
 - ✓ Herhangi bir parametrede yeşil bir onay işareti görünmüyorsa:
 - ✓ Proben kulak kanalına güvenli bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
 - ✓ Odadaki ve hastadan gelen gürültünün azaltıldığına emin olun.
- ✓ 3 parametrenin tümünde yeşil onay işareti olduğunda, test bir sonraki aşamaya geçecektir.


6 TARAMA SÜRECİ - ÖLÇÜM AŞAMASI

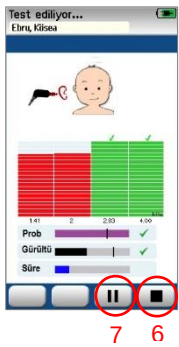

- ✓ Her frekans için test ilerledikçe renkli dikey çubuklar dolar.
 - ✓ **Kırmızı** çubuklar **Sağ** kulak testi için taramanın ilerlemesini yansıtmaktadır.
 - ✓ **Mavi** çubuklar **Sol** kulak testi için taramanın ilerlemesini yansıtmaktadır.
 - ✓ Üzerinde onay işareti bulunan Yeşil çubuk, geçti sonucu ile bir frekans bandını yansıtır.
- ✓ 3 frekans geçtiğinde, genel test **Başarılıdır**, test durur ve grafiğin üzerinde yeşil bir ✓ sembolü belirir.
- ✓ OAE tespit edilmeden 60 saniye geçtiğinde (**Bakınız**), test durur ve grafiğin üzerinde turuncu bir X sembolü belirir.
- ✓ Testi bitirmek için **Bitir** fonksiyon tuşunu (6) seçin. Tamamlanmamış bir test için sembol (?) görüntülenecektir.
- ✓ Ölçümü duraklatmak için **Durdur** fonksiyon tuşunu (7) seçin. Hazır olduğunuzda teste devam edin.

7 TEST SONRASI SEÇENEKLERİ

Etiket Yazdır

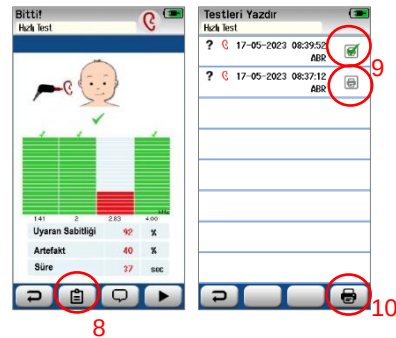

- ✓ Bu hasta için gerçekleştirilen testlerin bir listesini görüntülemek için **Test listesi** düğmesini seçin (8).
- ✓ Sol ve sağ kulak için en son test yazdırma için önceden seçilidir (işaretli). Ancak test satırındaki yazıcı simgesine (9) dokunarak bu seçim kaldırılabilir ve diğerleri seçilebilir.
- ✓ **Yazdırmak** istediğiniz testleri seçtikten sonra, **Yazdır** fonksiyon tuşunu seçin (yazıcının açık olduğundan emin olun) (10).

Ana Ekran Dönüş

- ✓ Yeni bir hasta için süreci başlatmak üzere **Ana** ekrana dönmek için **Ana** ekran düğmesine basın.

HearSIM'e Veri Aktarımı™

- ✓ easyScreen'i bilgisayarınıza bağlayın. Hasta ve test verilerini kalıcı depolama için aktarmak üzere HearSIM™ uygulamasını başlatın. Daha fazla bilgi için HearSIM™ kılavuzuna bakın.

Daha fazla bilgi için yerel distribütörünüze danışın veya şu şekilde iletişime geçin: MAICO Diagnostics GmbH, Sickingerstr. 70-71, 10553 Berlin, Almanya

Tel.: +49 30 70 71 46-50 - Faks: +49 30 70 71 46-99 - E-posta: sales@maico.biz - İnternet: www.maico.biz