

1 О КРАТКОМ РУКОВОДСТВЕ



Данное краткое руководство не является полноценным эквивалентом руководства по эксплуатации. Изучение полного руководства обязательно до начала эксплуатации устройства! Некоторые из нижеперечисленных функций могут отличаться в зависимости от индивидуально установленных параметров.

2 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- ✓ **Включение:** нажмите **Кнопку питания**, находящуюся на лицевой панели устройства touchTymп MI 26, чтобы включить устройство.
- ✓ **Выключение:** таким же образом нажмите **Кнопку питания**, чтобы выключить устройство.




3 РАБОТА С ЭКРАНОМ

Описание символов на панелях Строка состояния, Панель инструментов и Панель неизменных функций.

Строка состояния			Состояние соединения с ПК: выделяется зеленым, если touchTymп подключен к ПК, и MAICO Sessions активен.
Панель инструментов	Экран диагностики		Удалить: удаление последних данных исследований.
			Редактировать: редактирование данных рефлекса. Нажмите данную кнопку для входа в экран редактирования данных рефлекса.
			Передача на ПК: передача текущих измерений, если в настройках выбрана передача вручную. После передачи данных вручную данные удаляются.
			Печать: печать результатов всех проведенных тестов и всех тонов зонда.
			Ухо: выбор тестируемого уха, либо повторное тестирование одного уха (красный символ = правое ухо, синий = левое ухо).
			Старт, Стоп, Пауза: начать, прервать или приостановить диагностику.
	Экран настроек		Настройки по умолчанию: возврат из индивидуально-установленных настроек к заводским настройкам.
			Сохранить: сохранить настройки.
Панель неизменных функций			Home: выбор модуля тестирования.
			Тимпанометрия: открыть модуль тимпанометрии.
			Тимпанометрия и Акустический рефлекс: открыть модуль тимпанометрии и акустического рефлекса.
			Настройки: вход в меню всех параметров устройства.

4 ВЫБОР ИССЛЕДОВАНИЯ

Экран теста возможно открыть через экран **Домой**  либо посредством нажатия кнопок на панели неизменных функций: **Тимпанометрия**  и **Тимпанометрия и Акустические рефлекс** .

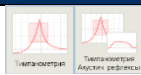


5 ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ТЕСТА

ЗОНД	УСТРОЙСТВО ДО 08/2024	УСТРОЙСТВО ПОСЛЕ 08/2024	ИНФОРМАЦИЯ
	-	Статус В ожидании	Выбирается правое или левое ухо. Зонд находится вне уха.
	Статус В ожидании	-	Выбрано правое ухо. Зонд находится вне уха.
	Статус В ожидании	-	Выбрано левое ухо. Зонд находится вне уха.
	Статус Зонд в ухе Статус Тестирование Статус Выполнено	-	Зонд находится в ухе и герметичен, выполняется тест или тест завершен.
	Статус Блокировка Статус Утечка	-	Зонд находится в ухе, заблокирован или имеется утечка.
Отсутствие индикации	Статус Нет данных Статус Нет зонда	-	Зонд неправильно подсоединен или тон зонда не задан.


6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОЦЕНКА ТИМПАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТА И АКУСТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСА

Тимпанометрические исследования осуществляются перед каждым тестом акустического рефлекса с целью определения максимально подходящего давления для большей эффективности.

Тимпанометрия

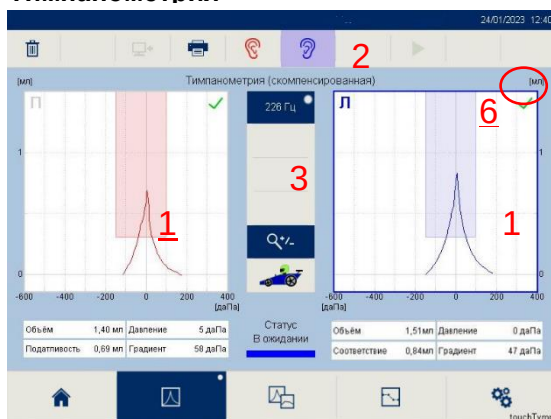

Тимпанометрия и Акустический рефлекс

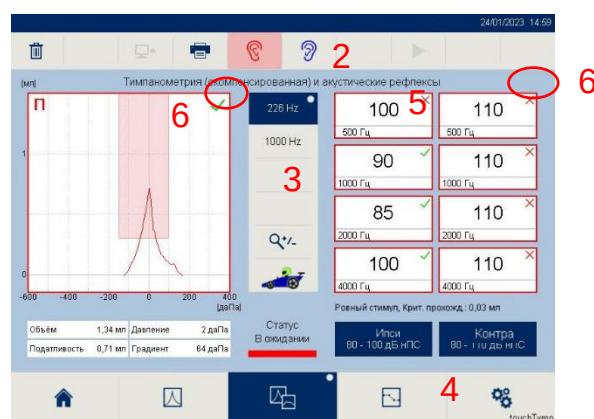

Выберите тестируемое ухо

- ✓ Нажмите на соответствующую тимпанограмму (1), кнопки “ухо” (2) или кнопку на зонде (красный символ = правое ухо, синий = левое).

Выберите частоту тестирования

- ✓ Тимпанометрическое исследование: нажмите на соответствующую кнопку (3).
- ✓ Диагностика акустического рефлекса: нажмите кнопки **Ipsi** и **Contra** (4), а также кнопки выбора частоты (5) для изменения стимула акустического рефлекса, установленного по умолчанию, при необходимости. Красная/синяя рамка вокруг стимула сигнализирует, что он выбран и готов к действию.

Начало тестирования

- ✓ Измерение начнется с момента корректного размещения зонда в ухо для осуществления автоматического исследования. Нажмите кнопку **начать** ► или **зонд** для выбора вручную.

Результаты

- ✓ Результаты (6) представлены в результатах тимпанограмм и/или акустического рефлекса в графической форме или таблице. Критерии результатов основываются на заданных настройках.

✓	Прошел
✗	Нет ответа

7 УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТА

- ✓ **Удалить** : удаление результатов теста.
- ✓ **Печать** : моментальная печать результатов. Печать с устройства включает результаты всех тестов одновременно (например, 226 Гц и 1000 Гц).

По вопросам обращайтесь к локальным дистрибьюторам или MAICO Diagnostics GmbH, Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlin, Germany. Tel.: +49 30 70 71 46-50 • Fax: +49 30 70 71 46-99 • E-mail: sales@maico.biz • Internet: www.maico.biz