

1 O TEJTO STRUČNEJ PRÍRUČKE




Táto stručná príručka nemá nahradiť návod na obsluhu. Prečítanie celého návodu na obsluhu pred použitím zariadenia je povinné!
Niektoré z nasledujúcich funkcií sa môžu líšiť podľa jednotlivých nastavení.

2 ZAPNUTIE A VYPNUTIE NAPÁJANIA

- ✓ Na zapnutie a vypnutie zariadenia použite vypínač na zadnej strane zariadenia.
- ✓ Ak zariadenie nepoužívate, vždy ho vypnite, aby ste zabránili vypáleniu obrazovky.

3 PREHĽAD TLAČIDIEL A IKON

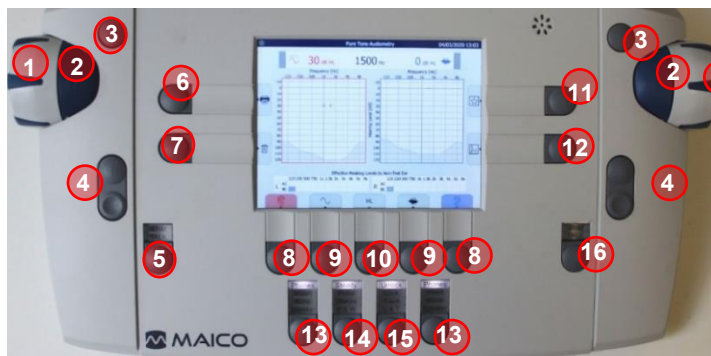

Funkčné tlačidlá 6 až 12 majú dve možnosti voľby. Keď sa vedľa ikony zobrazí šípka (napr. ▲, ►), dlhým stlačením je k dispozícii výberové menu.

- **Krátko stlačte** (stlačte tlačidlo krátko) → Priamy výber
- **Dlho stlačte** (stlačte 2 s) → Otvorí ponuku výberu. Napr:



	Tónový test		Ľavé/pravé ucho/ binaurálne		Mikrofón		Tlač (termálna tlačiareň)
	Test reči		Tón/šumový signál pre deti		Pomocná 1/2		Vytlačiť PDF
	Špeciálne testovacie menu		Maskovanie šumu		Vlna 1/2		Odstrániť
	Ponuka nastavení		Návrat		Zoznam rečových testov		Odstrániť jednotlivo
	Uložiť do / otvoriť databázu		Uložiť		Upraviť pacienta		Zobraziť reláciu

4 TÓNOVÁ AUDIOMETRIA

Ak chcete prejsť na obrazovku **Tone Test**, vyberte tlačidlo 12. Návod na obsluhu **Tone Test (Tónový test)**:

Úloha	#	Akcia	Stlačte	Výber
Parametre testu	8	Zmena uší (ľavý/pravý kanál)	Krátko	
	1	Vybraná úroveň (dB HL)		Ovládací volič
	4	Výber frekvencie (Hz)		+ zvýšenie Hz / - zníženie Hz
	13	Výber snímača		Telefóny/vložka/monitor/reproduktor
	14	Výber testovacieho signálu		Rovnomerné/impulzné/výstražné/P & W
	10	Vyberte typ testu		HL/MCL/UCL/HL
	9	Zmena typu signálu (ľavý/pravý kanál)	Krátko	
Prezentácia signálu	2	Režim prezentátora: prítomný signál		tlačidlo, signál sa zapne stlačením
		Režim prerušovača: signál prerušenia		tlačidlo, signál sa vypne stlačením
Uloženie jednotlivých výsledkov	3	Uložiť výsledok	Krátko	S tlačidlo
		Uložiť Bez odozvy	Dlho	S tlačidlo
Pokročilá testovacia funkcia	8	Rýchla zmena na individuálnu voľbu uší na kanál	Dlho	
	9	Rýchla zmena na individuálnu voľbu Signál pre každý kanál	Dlho	
Správa údajov	7	Odstránenie relácie	Krátko	
		Odstránenie jedného bodu	Dlho	
	6	Tlač na termálnej tlačiarňi	Krátko	
		Uložiť ako PDF	Dlho	
		Uložiť do / otvoriť databázu	Krátko	

5 REČOVÁ AUDIOMETRIA

Ak chcete prejsť na obrazovku **Speech Test**, vyberte tlačidlo  **12**. Rečové materiály môžu byť prezentované prostredníctvom mikrofónu, externého pomocného vstupu alebo interných vlnových súborov. Predvolený výber je možné vykonať v nastaveniach.

K obsluhu ďalších tlačidiel na testovanie reči patria:

Úloha	#	Akcia	Stlačte	Výber
Parametre testu	9	Zmena typu signálu (ľavý/pravý kanál)	Krátko	predvolený vstup / 
		Rýchla zmena na individuálnu voľbu Signál pre každý kanál	Dlho	 / /   / 
	10	Vyberte typ testu		SRT/WRS/MCL/UCL/SRT WRS 
	5/16	Zapnutie kanála na prezentáciu pacientovi	Krátko	tlačidlo STIM
	4	SRT: prechádza cez slovo na výber WRS: prezentované slovo s bodovým hodnotením		+ ďalšia položka /- predchádzajúca položka + správne /- nesprávne

POZNÁMKA:

-  a  vyžaduje aktiváciu podnetu pomocou tlačidla **STIM 5** alebo **16**, aby sa začala prezentácia.
- Vstupnú kalibráciu  a  možno dokončiť pomocou tlačidla **STIM/Monitor 7**.

Tlačidlo na testovanie vlnových súborov:

Úloha	#	Akcia	Stlačte	Výber
Parametre testu	12	Vyberte zoznam rečových testov	Krátko	
	2	Prehrávanie vlnového súboru: SRT/SRT  : každá položka sa prehráva samostatne WRS/WRS  : Pokračovanie prehrávania po získaní bodu		 tlačidlo

6 ŠPECIÁLNA TESTOVACIA AUDIOMETRIA

Ak chcete vstúpiť do **ponuky špeciálneho testu**, vyberte tlačidlo  **11**.

- ✓ Zobrazí sa ponuka na výber špeciálneho testu, napr. **vysokofrekvenčná audiometria** (voliteľná licencia), **Stengerov test čistých tónov** alebo **SISI test** (voliteľná licencia). Zoznam špeciálnych testov, ktoré je možné vybrať, závisí od zakúpených licencií.
- ✓ Po výbere sa zobrazí špeciálna testovacia obrazovka

7 VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Úloha	#	Akcia	Stlačte	Výber
Výbery	1	Výber zvýraznenia		Ovládací volič
	2	Potvrdenie výberu ponuky		 tlačidlo
Komunikácia	5	Hovorte dopredu a hovorte späť	Dlhé	Tlačidlo STIM/Talk
	16	Kalibrácia monitora a vstupov	Dlhé	tlačidlo STIM/Monitor
Nastavenia	11	Vstup do ponuky nastavení	Dlhé	 → 
	6	Priamy prechod na obrazovku Tone Test		
	7	Priamo prejdite na obrazovku testu reči		
	11	Návrat na predchádzajúcu obrazovku		

Ďalšie informácie vám poskytne váš miestny distribútor alebo spoločnosť MAICO Diagnostics GmbH, Sickingerstr. 70-71, 10553 Berlín, Nemecko
Tel.: +49 30 70 71 46-50 - Fax: +49 30 70 71 46-99 - E-mail: sales@maico.biz - Internet: www.maico.biz