

1 ERRŐL A GYORS ÚTMUTATÓRÓL




Ez a rövid útmutató nem helyettesíti a kezelési útmutatót. A készülék üzemeltetése előtt a teljes kezelési útmutató elolvasása kötelező! Az alábbi funkciók némelyike az elvégzett egyedi beállításoktól függően változhat.

2 LEÍRÁS

Az MA 25 / MA 25e / MA 27 / MA 27e légvezetéses tisztahang audiométerek. Az MA 25e és az MA 27e az MA 25 / MA 27 funkcióit automatikus Hughson-Westlake hallásküszöb-tesztel, utasító funkcióval és az eredmények PC-re történő átvitelével bővíti.

3 GOMB FUNKCIÓJA

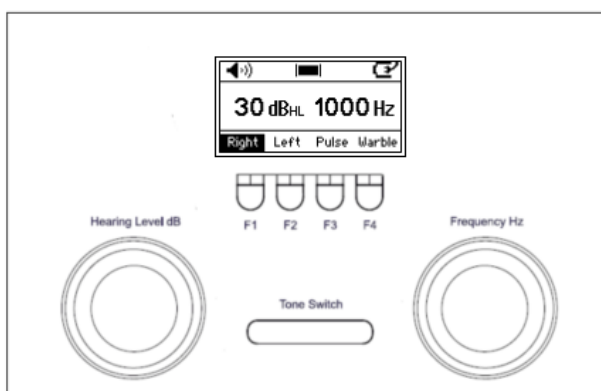

Név(ek) / funkció(k)	Leírás
Bekapcsolás	Nyomja meg a hangkapcsolót (Tone Switch) Figyelem! A bekapcsolás csak akkor lehetséges, ha a fejhallgató be van dugva!
Kikapcsolás	Nyomja meg a Hallás szint dB (Hearing Level dB) tárcsát és a Frekvencia Hz (Frequency Hz) tárcsát.
Hangkapcsoló	Nyomja meg a hang megszólaltatásához. A képernyőn megjelenik a hang megszólaltatás ikonja (pl.).
Hallás szint dB	Forgassa el a megszólaltatott hang hangosság szintjének kiválasztásához.
Frekvencia Hz	Forgassa el a megszólaltatott hang frekvenciájának kiválasztásához.


Funkciógombok MA 25 / MA 27

F1	F2	F3	F4
Jobb fül kiválasztása	Bal fül kiválasztása	Pulzálás Be/Ki	Warble Be/Ki

Funkciógombok MA 25e / MA 27e

F1	F2	F3	F4
Váltás a jobb és a bal oldal között	Tárolás: küszöbérték	Pulzálás Be/Ki	Warble Be/Ki

4 KIJELEZÉS

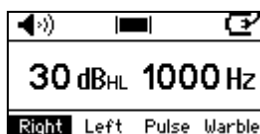

A hangjelzés megszólal (bekapcsolva).



Nincs hang (ki van kapcsolva).



A páciens válasz nyomógomb aktív (megnyomták).



A páciens válasz nyomógomb nem aktív (nem nyomták meg).



A készülék áramforráshoz csatlakozik.



Ha a készülék elemről működik, az elem ikonja az elem töltöttségi szintjétől függően változik.



Ha az elemek lemerülnek, a képernyőn a **Low Battery (Alacsony elemszint)** felirat jelenik meg és villogni kezd.

5 BEÁLLÍTÁS MENÜ

A beállítás menü eléréséhez nyomja meg az F1 és F4 gombokat egyszerre 2-3 másodpercig.

F1	F2	F3	F4
Beállítás módosítása	Böngészés felfelé (↑) a beállítás menüben	Lapozzon lefelé (↓) a beállítás menüben.	A beállítások mentése és a beállítás menüből való kilépés

6 Az MA 25e / MA 27e különleges funkciói

- Beszéd továbbítása (utasító funkció):** Tartsa lenyomva a **Hallás szint dB** tárcsát a Beszéd továbbítása aktiválásához. A hangosság szint beállításához tartsa lenyomva és forgassa a **Hearing Level dB** tárcsát.

Nyomja le a frekvenciátárcsát a menü aktiválásához.



- Speciális funkciógombok MA 25e / MA 27e:**

F1	F2	F3	F4
A készülékben tárolt összes hallásküszöb törlése	Nem hallotta küszöbérték tárolása	A készülékben tárolt hallásküszöbök megjelenítése	Automatikus Hughson-Westlake (HW) teszt indítása

- PC transzfer:** Az adatok PC-re történő átviteléhez **MAICO-Sessions** szoftverre van szükség. A megfelelő telepítési és átviteli utasításokért tekintse át a használati útmutatót.