

easyTymp™ Verze Plus Stručný průvodce

Verze easyTymp Plus

Verze easyTymp Pro umožňuje měření kontralaterálního akustického reflexu, rozpadu reflexu a testování funkce Eustachovy trubice po zakoupení volitelné sondy Contra Probe a aktivaci další licence.


Použití sondy Contra



Pro měření kontralaterálních reflexů je nutné připojit sondu Contra Probe k přístroji easyTymp Plus Version. Na sondě Contra Probe najdete označení "Contra". Do tohoto konektoru vložte kontralaterální snímač a pomocí klipu umístěného na zadní straně sondy Contra Probe jej připevněte k oděvu pacienta. Pro většinu pacientů je nejjednodušší připnout sondu Contra Probe k pacientově košili.

Stisknutím tlačítka na boku sondy Contra spustíte nebo zastavíte/pozastavíte aktuální měření nebo přepnete mezi pravou a levou stranou, když sonda není vložena do ucha.

Pokročilé testování

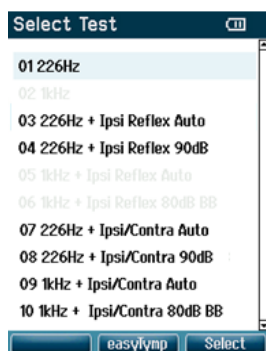

Pokročilé testování:

- Kontralaterální akustické reflexy

Další licence pro verzi easyTymp Plus:

- Licence pro vysokofrekvenční tón sondy 1 kHz

POZNÁMKA: Seznam protokolů je založen na verzi a licencování. Neaktivní protokoly jsou zobrazeny jako duchové.

Testování akustického reflexu

Před provedením vyšetření kontralaterálního reflexu by měla být provedena tympanometrie.

