

easyTymp™ Stručný průvodce

Příprava měření

Chcete-li začít, stiskněte červenou nebo modrou šipku   a zapněte zařízení.
Pokud zařízení easyTymp uložíte do kolébky, zapne se automaticky po vyjmutí zařízení z kolébky.

Manipulace s ušními nástavci

V závislosti na velikosti a tvaru zvukovodu a ucha vyberte ze sady ušních koncovek vhodnou velikost. Nasadte ušní špičku pevně na hrot sondy.

Ovládací panel



Funkční klávesy:

- Horní tlačítka: Funkce tlačítek souvisí s funkcemi uvedenými na displeji nad jednotlivými funkčními tlačítky. (např. Vybrat test, Pacient, Zastavit).

  Klávesy se šipkami: Stisknutím klávesy se šipkou doprava nebo doleva zapnete easyTymp.
Stisknutím obou kláves současně vypnete aplikaci easyTymp.

 Tlačítka nahoru a dolů: Tlačítka: Procházejte různými nabídkami nastavení easyTymp, testovacími protokoly nebo displejem nahoru a dolů.

Spuštění testu

Aplikace easyTymp se vždy spustí na testovací obrazovce a je připravena zahájit měření. Bude používat stejný protokol jako dříve.

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

Select Test

Patient

Stop

Při vstupu na obrazovku Test se na druhém řádku zobrazí název použitého protokolu.

Otevře obrazovku s dostupnými testovacími protokoly.

Na této obrazovce můžete buď uložit data ke stávajícímu pacientovi, který mohl být nahrán z vaší databáze, nebo uložit data k novému klientovi.


Stisknutím tlačítka Stop měření ukončíte.

Po dokončení testování přejde aplikace easyTymp automaticky na obrazovku Hotovo.

Zobrazuje

Test: Ready

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

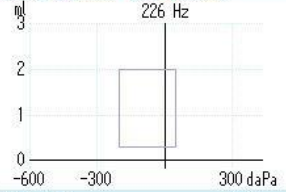

Volume ml
Compliance ml
Pressure daPa
Gradient daPa

Select Test Patient Stop

Stisknutím tlačítka Vybrat test načtete jiný protokol.
Stisknutím tlačítka Pacient zobrazíte seznam pacientů.

Select Test

01 Tymp 226Hz
02 Tymp 1kHz
03 Tymp 226Hz + Auto Reflex
04 Tymp 226Hz + Reflex 90dB
05 Tymp 1kHz + Auto Reflex
06 Tymp 1kHz + Reflex 80dB WB

easylymp Select

Stisknutím tlačítka Select vyberte test a spusťte měření.

View Patients

☐ Andy Andrews
☒ John Doe
☐ Dick Solomon

Back Details Result


Výběrem pacienta nahoru / dolů.
Stisknutím tlačítka Výsledek zobrazíte uložené výsledky.

Spravovat měření

Po dokončení testování přejde aplikace easyTymp automaticky na obrazovku Hotovo. Na obrazovce Hotovo lze měření obou uší zkontrolovat, vytisknout a/nebo uložit.

Done!

Tympanogram

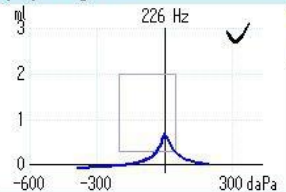

Volume 1.65 ml
Compliance 0.67 ml
Pressure -1 daPa
Gradient 69 daPa

Print Save Delete

Posunutím dolů zobrazíte výsledky reflexních testů.

Select Pat. & Save

☐ New Patient: Number 4
☒ Andy Andrews
☒ John Doe
☒ Dick Solomon

Back Edit New Save

Buď uložte data k existujícímu pacientovi, nebo je uložte k novému klientovi.

Edit New

ID
First Name
Last Name
Birth Date DD : MM : YYYY

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - *
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

Save Select Next

Tlačítka nahoru a dolů posouvají výběr klávesnice o jeden znak nahoru nebo dolů. Při úpravě data narození tlačítka Nahoru a Dolů mění číselnou hodnotu.