

easyTymTM Pro verze Stručný průvodce

easyTym Pro verze

Verze easyTym Pro umožňuje měření kontralaterálního akustického reflexu, rozpadu reflexu a testování funkce Eustachovy trubice po zakoupení volitelné sondy Contra Probe a aktivaci další licence.

Použití sondy Contra



Pro měření kontralaterálních reflexů je nutné připojit sondu Contra Probe k přístroji easyTym Pro Version. Na sondě Contra Probe najdete označení "Contra". Do tohoto konektoru vložte kontralaterální snímač a pomocí klipu umístěného na zadní straně sondy Contra Probe jej připevněte k oděvu pacienta. Pro většinu pacientů je nejjednodušší připnout sondu Contra Probe k pacientově košili.

Stisknutím tlačítka na boku sondy Contra spustíte nebo zastavíte/pozastavíte aktuální měření nebo přepnete mezi pravou a levou stranou, když sonda není vložena do ucha.

Pokročilé testování



Pokročilé testování:

- Kontralaterální akustické reflexy
- Ipsi- a kontralaterální rozpad akustického reflexu a testování funkce Eustachovy trubice




Další licence pro verzi easyTym Pro:

- Licence pro vysokofrekvenční tón sondy 1 kHz


POZNÁMKA: Seznam protokolů je založen na verzi a licencování. Neaktivní protokoly jsou zobrazeny jako duchové.

Testování akustického reflexu


Před provedením vyšetření kontralaterálního reflexu by měla být provedena tympanometrie.

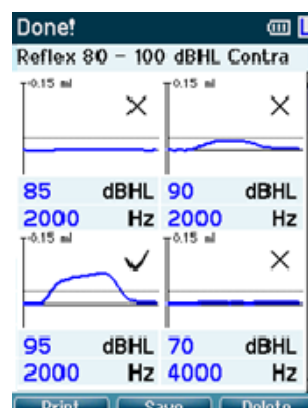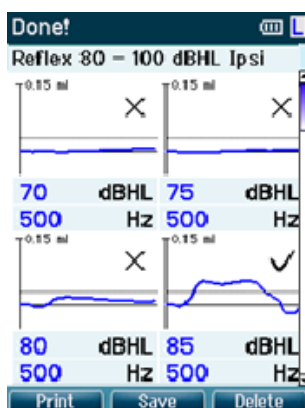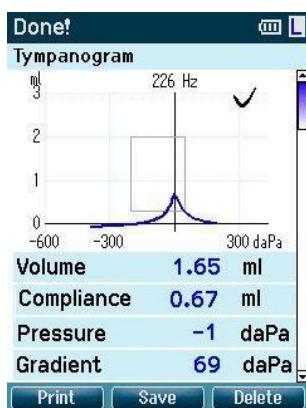

Akustický reflexní rozpad a testování ETF

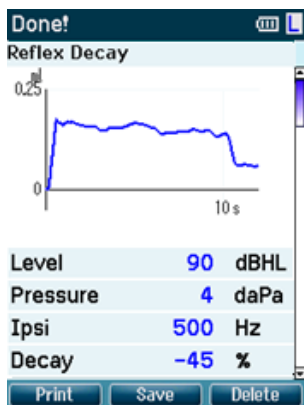

Lze provést testování ipsilaterálního a kontralaterálního akustického reflexního rozpadu.

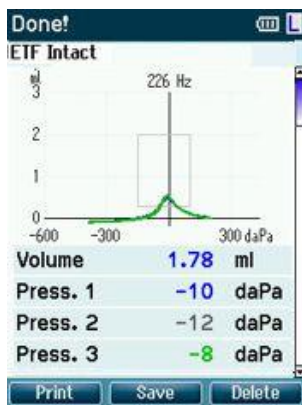

Pokyny k testování se zobrazí v horní části obrazovky.

- (1) Červená nebo modrá: představuje testovací ucho
- (2) Šedá: představuje "vlaštovku"
- (3) Zelená: představuje "Valsalvation"



Poučte pacienta, aby polykal.

Měření měnícího se tlaku indikuje stav Eustachovy trubice.