

1 ERRŐL A RÖVID ÚTMUTATÓRÓL



Ez a rövid útmutató nem helyettesíti a kezelési útmutatót. A készülék üzemeltetése előtt a teljes kezelési útmutató elolvasása kötelező! Az alábbi funkciók némelyike az elvégzett egyedi beállításoktól függően változhat.

2 FELKÉSZÜLÉS A VIZSGÁLATRA

A hallásvizsgálathoz egy csendes szoba a legjobb.

- ✓ Hagyja abba a beszélgetést, kapcsolja ki a tévét és más akusztikus zajforrásokat, zárja be az ajtót, hogy kizárja a külső zajokat.

Jó az időzítés?


- ✓ Minél tovább tud várni az újszülött szűrésével, annál nagyobb a **Pass (Megfelelt)** eredmény valószínűsége. Kerülje a mérést a születést követő 12 óra előtt.
- ✓ A szűrés akkor a legsikeresebb, ha a csecsemő épp akkor kapott enni, és kényelmesen alszik.

Szerelje fel a fülillesztéket a standard OAE szondára vagy a SnapPROBE™-ra.




- ✓ Győződjön meg arról, hogy a szonda és minden alkatrésze tiszta állapotban van.
- ✓ Válassza ki a páciens hallójáratához illeszkedő eldobható fülillesztéket.
- ✓ Csatlakoztassa a fülillesztéket a szondához.

Helyezze a szondát a fülillesztékkel együtt a fülbe

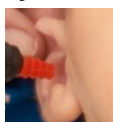

- ✓ Helyezze a szondát biztonságosan a baba hallójáratába.
- ✓ Ügyeljen arra, hogy a szonda elég mélyen legyen behelyezve, hogy ne essen ki túl könnyen.

3 A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

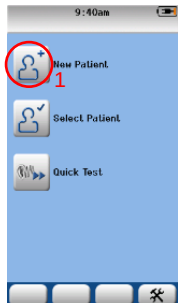


A készülék bekapcsolása

- ✓ Az easyScreen bekapcsolásához nyomja meg a **Home** gombot.

Új páciens bevitel


- ✓ Érintse meg az **New Patient (Új páciens)** gombot az adatbeviteli képernyő megnyitásához (1).

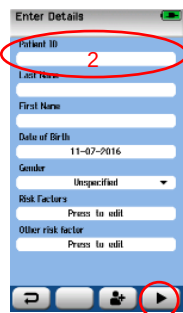

A páciens adatainak megadása

- ✓ Érintse meg a mezőket a páciens adatainak megadásához.
- ✓ A páciens mentéséhez meg kell adnia egy azonosítót (2).
- ✓ Érintse meg a **Test** funkcióbillentyűt, ha a kívánt mezők kitöltésre kerültek (3).

4 KEZDJE MEG A SZŰRÉST

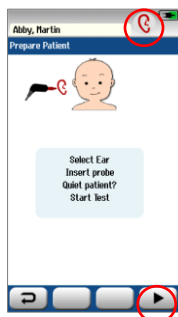

Válassza ki a fület

- ✓ Amikor megjelenik a teszt képernyő, érintse meg a **fül** gombot, amíg a tesztelni kívánt fül szimbóluma meg nem jelenik. **Piros = jobb. Kék = bal.** (4).


Készen áll a baba?

- ✓ Várjon a vizsgálat megkezdésével, amíg a baba nyugodt és csendes nem lesz.

Kezdje meg a mérést


- ✓ Érintse meg a **Teszt** funkcióbillentyűt a mérés megkezdéséhez (5).

5 SZŰRÉSI FOLYAMAT - SZONDA ILLESZKEDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

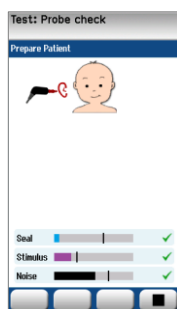

- ✓ Ellenőrizzük a szonda illeszkedését a hallójáratban.
- ✓ A felső állapotsorban megjelenő szöveg a szonda illeszkedési állapotát írja le. Az alatta lévő sávok mutatják:
 - ✓ **Seal** – (lezárt) a szonda biztonságosan illeszkedik-e a hallójáratba.
 - ✓ **Stimulus** - megfelelő-e az hangstimulus.
 - ✓ **Noise** – (zaj) van-e túlzott akusztikai zaj.
- ✓ Ha valamelyik paraméter mögött nem jelenik meg zöld pipa, akkor:
 - ✓ Ellenőrizze, hogy a szonda biztosan a hallójáratban van-e.
 - ✓ Gondoskodjon arról, hogy a szobában lévő és a páciens által keltett zaj csökkenjen.
- ✓ Ha mindhárom paramétert zöld pipa követi, a teszt a következő fázisba lép.


6 SZŰRÉSI FOLYAMAT - MÉRÉSI FÁZIS

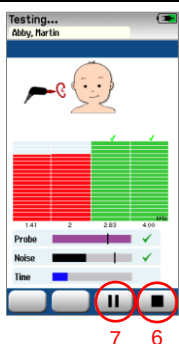

- ✓ Az egyes frekvenciák függőleges sávjai a teszt előrehaladtával színnel töltődnek ki.
 - ✓ **A piros sávok a jobb** fül vizsgálatának előrehaladását tükrözik.
 - ✓ **A kék sávok a bal** fül vizsgálatának előrehaladását tükrözik.
 - ✓ A zöld sáv, amely felett egy pipa van, megfelelt frekvenciasávot jelez.
- ✓ Ha 3 frekvencia megfelelt, akkor a teljes teszt **megfelelt**; a teszt leáll, és a grafikon felett megjelenik egy zöld ✓ szimbólum.
- ✓ Ha 60 másodperc elteltével nem észlel OAE-t (**Refer, Beutalandó**), a vizsgálat leáll, és a grafikon felett egy narancssárga ✗ szimbólum jelenik meg.
- ✓ A leállítás kikényszerítéséhez nyomja meg a **Stop**  funkcióbillentyűt (6). A kijelzőn megjelenik a befejezetlen teszt szimbóluma (?).
- ✓ A mérés szüneteltetéséhez nyomja meg a **Pause (Szünet)**  funkcióbillentyűt (7). Ezt követően folytassa, ha készen áll.

7 TESZT UTÁNI OPCIÓK

Címke nyomtatása

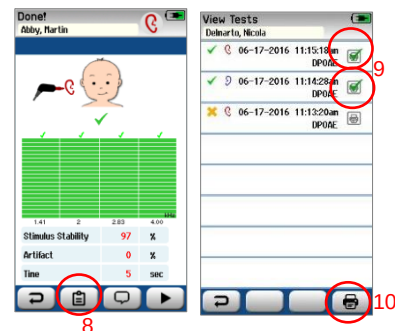

- ✓ Válassza a **Tesztlista**  gombot az adott betegnél elvégzett vizsgálatok listájának megtekintéséhez (8).
- ✓ A bal és a jobb fül legutóbbi tesztje előre ki van választva (be van jelölve) a nyomtatáshoz. A tesztek sorában (9) a nyomtató ikonjának megérintésével azonban ez a kijelölés megszüntethető, és másikat lehet választani.
- ✓ A nyomtatni kívánt tesztek kiválasztása után válassza a **Nyomtatás**  funkcióbillentyűt (győződjön meg róla, hogy a nyomtató be van kapcsolva) (10).

Vissza a kezdőlapra

- ✓ Nyomja meg a **Kezdőlap** gombot a **Kezdőlap** képernyőre való visszatéréshez, hogy megkezdhesse az új páciens vizsgálatát.

Áttöltés a HearSIM-be™

- ✓ Csatlakoztassa az easyScreen-t a számítógépéhez, és indítsa el a HearSIM™ alkalmazást a páciens- és vizsgálati adatok tartós tárolásra történő átviteléhez. További információkért olvassa el a HearSIM™ kézikönyvet.