

easyTymp™ Stručný sprievodca

Príprava merania

Ak chcete začať, stlačte červené alebo modré tlačidlo so šípkou  , čím zariadenie zapnete.
Ak zariadenie easyTymp uložíte do kolísky, zapne sa automaticky po vybratí zariadenia z kolísky.

Manipulácia s koncovkami do uší

Vyberte si zo sady ušných koncoviek vhodnú veľkosť v závislosti od veľkosti a tvaru zvukovodu a ucha. Ušnú špičku pevne nasadíte na hrot sondy.

Ovládací panel



Funkčné klávesy:

- Horné tlačidlá: Funkcia tlačidiel súvisí s funkciami uvedenými na displeji nad jednotlivými funkčnými tlačidlami. (napr. Vybrať test, Pacient, Zastaviť)



Klávesy so šípkami: Stlačením tlačidla so šípkou vpravo alebo vľavo zapnete easyTymp.

Vypnete aplikáciu easyTymp súčasným stlačením oboch tlačidiel.



Tlačidlá nahor a nadol: Prechádzajte rôznymi ponukami nastavení easyTymp, testovacími protokolmi alebo nahor a nadol na displeji.

Spustenie testu

Aplikácia easyTymp sa vždy spustí na testovacej obrazovke a je pripravená začať meranie. Bude používať rovnaký protokol ako predtým.

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

Select Test

Patient

Stop

Pri vstupe na obrazovku Test sa v druhom riadku zobrazí názov použitého protokolu.

Otvorí obrazovku s dostupnými testovacími protokolmi.

Na tejto obrazovke môžete buď uložiť údaje k existujúcemu pacientovi, ktorý mohol byť nahraný z vašej databázy, alebo uložiť údaje k novému klientovi.


Stlačením tlačidla Stop ukončíte meranie.

Po dokončení testovania program easyTymp automaticky prejde na obrazovku Hotovo.

Zobrazuje

Test: Ready

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

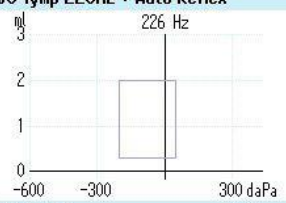

Volume ml

Compliance ml

Pressure daPa

Gradient daPa

Select Test Patient Stop

Stlačením tlačidla Vybrať test načítate iný protokol.

Stlačením tlačidla Pacient zobrazíte zoznam pacientov.

Select Test

01 Tymp 226Hz

02 Tymp 1kHz

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

04 Tymp 226Hz + Reflex 90dB

05 Tymp 1kHz + Auto Reflex

06 Tymp 1kHz + Reflex 80dB WB

easylymp Select

Prejdite nahor / nadol, aby ste vybrali test a spustili meranie stlačením tlačidla Vybrať

View Patients

☐ Andy Andrews

☒ John Doe

☐ Dick Solomon

Back Details Result

Prechodom nahor / nadol vyberte pacienta.


Stlačením tlačidla Výsledok zobrazíte uložené výsledky.

Spravovať meranie

Po dokončení testovania program easyTymp automaticky prejde na obrazovku Hotovo. Na obrazovke Hotovo môžete skontrolovať, vytlačiť a/alebo uložiť merania oboch uší.

Done!

Tympanogram

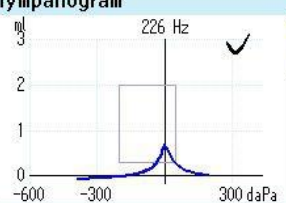

Volume 1.65 ml

Compliance 0.67 ml

Pressure -1 daPa

Gradient 69 daPa

Print Save Delete

Posunutím nadol zobrazíte výsledky reflexných testov.

Select Pat. & Save

☐ New Patient: Number 4

☒ Andy Andrews

☒ John Doe

☒ Dick Solomon

Back Edit New Save

Buď uložte údaje k existujúcemu pacientovi, alebo uložte údaje k novému klientovi.

Edit New

ID

First Name

Last Name

Birth Date DD : MM : YYYY

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - *

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Save Select Next

Tlačidlá nahor a nadol posúvajú výber klávesnice o jeden znak nahor alebo nadol. Pri úprave dátumu narodenia tlačidlá Nahor a Nadol zmenia číselnú hodnotu.