

Verzia easyTymp Plus

Verzia easyTymp Pro umožňuje kontralaterálne meranie akustického reflexu, rozpad reflexu a testovanie funkcie Eustachovej trubice po zakúpení voliteľnej sondy Contra Probe a aktivácii dodatočnej licencie.

Používanie sondy Contra



Na meranie kontralaterálnych reflexov je potrebné pripojiť sondu Contra Probe k prístroju easyTymp Plus Version. Na sonde Contra Probe nájdete označenie "Contra". Do tohto konektora vložte kontralaterálny snímač a pomocou klipu umiestneného na zadnej strane sondy Contra Probe ho pripevnite k odevu pacienta. Pre väčšinu pacientov je najjednoduchšie pripnúť sondu Contra Probe k pacientovej košeli.

Stlačením tlačidla na bočnej strane sondy Contra spustíte alebo zastavíte/prerušíte aktuálne meranie alebo prepnete medzi pravou a ľavou časťou, keď sonda nie je

vložená do ucha.

Pokročilé testovanie



Pokročilé testovanie:

- Kontralaterálne akustické reflexy

Ďalšie licencie pre verziu easyTymp Plus:

- Licencia pre vysokofrekvenčný tón sondy 1 kHz

POZNÁMKA: Zoznam protokolov je založený na verzii a licencií. Neaktívne protokoly nie sú zobrazené ako duchovia.

Testovanie akustického reflexu

Pred vykonaním kontralaterálneho reflexného vyšetrenia by sa mala vykonať tympanometria.

