

easyTymp™ Pro verzia Stručný sprievodca

Verzia easyTymp Pro

Verzia easyTymp Pro umožňuje kontralaterálne meranie akustického reflexu, rozpad reflexu a testovanie funkcie Eustachovej trubice po zakúpení voliteľnej sondy Contra Probe a aktivácii dodatočnej licencie.

Používanie sondy Contra



Na meranie kontralaterálnych reflexov je potrebné pripojiť sondu Contra Pro k prístroju easyTymp Pro Version. Na sonde Contra Probe nájdete označenie "Contra". Do tohto konektora vložte kontralaterálny snímač a pomocou klipu umiestneného na zadnej strane sondy Contra Probe ho pripevnite k odevu pacienta. Pre väčšinu pacientov je najjednoduchšie pripnúť sondu Contra Probe k pacientovej košeli.

Stlačením tlačidla na bočnej strane sondy Contra spustíte alebo zastavíte/prerušíte aktuálne meranie alebo prepnete medzi pravou a ľavou časťou, keď sonda nie je vložená do ucha.

Pokročilé testovanie



Pokročilé testovanie:

- Kontralaterálne akustické reflexy
- Ipsi- a kontralaterálny rozpad akustického reflexu a testovanie funkcie Eustachovej trubice




Ďalšie licencie pre verziu easyTymp Pro:

- Licencia pre vysokofrekvenčný tón sondy 1 kHz


POZNÁMKA: Zoznam protokolov je založený na verzii a licencií. Neaktívne protokoly nie sú zobrazené ako duchovia.

Testovanie akustického reflexu


Pred vykonaním kontralaterálneho reflexného vyšetrenia by sa mala vykonať tympanometria.

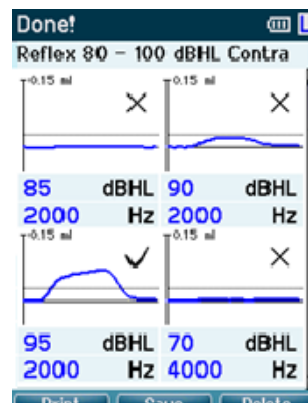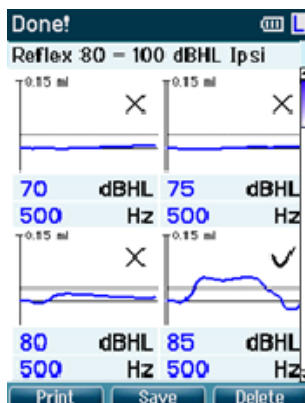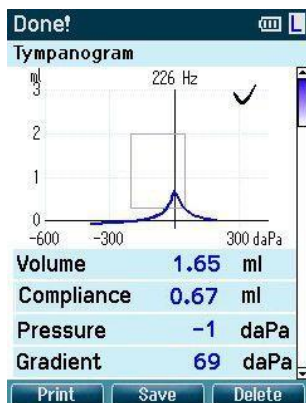

Akustický reflexný rozpad a testovanie ETF

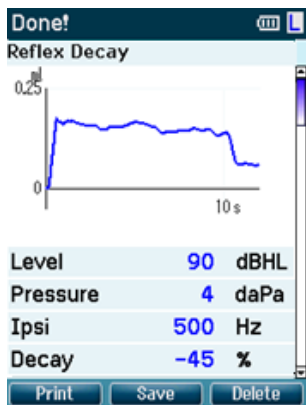

Možno vykonať testovanie ipsilaterálneho a kontralaterálneho akustického reflexného rozpadu.

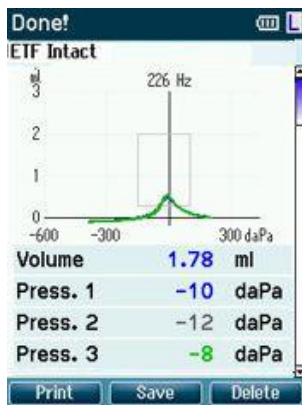

Pokyny na testovanie sa zobrazia v hornej časti obrazovky.

- (1) Červená alebo modrá: predstavuje testovacie ucho
- (2) Sivá: predstavuje "Lastovičku"
- (3) Zelená: predstavuje "Valsalvation"



Poučte pacienta, aby prehltal.

Meranie meniaceho sa tlaku indikuje stav Eustachovej trubice.