

1 PAR ŠO ĀTRO ROKASGRĀMATU



Šī ātrā rokasgrāmata nav paredzēta, lai aizstātu lietošanas instrukciju. Pirms ierīces lietošanas ir obligāti jāizlasa visa lietošanas instrukcija!
Dažas no turpmāk minētajām funkcijām var atšķirties atkarībā no individuālajiem iestatījumiem.

2 SAGATAVOŠANĀS TESTĒŠANAI

Dzirdes pārbaudei vislabāk piemērota ir klusa telpa.

- ✓ Pārtrauciet runāt, izslēdziet televizorus un citus akustiskos trokšņu avotus, aizveriet durvis, lai izslēgtu ārējos trokšņus.

Vai ir piemērots laiks?


- ✓ Jo ilgāk varat pagaidīt ar jaundzimušā pārbaudi, jo lielāka ir iespēja, ka rezultāts **būs pozitīvs**. Izvairieties no pārbaudes veikšanas pirms ne ātrāk kā 12 stundām pēc dzimšanas.
- ✓ Pārbaude ir visveiksmīgākā, ja bērns tikko ir pabarots un mierīgi guļ.

Uzstādiet ausu uzgali uz standarta OAE zondes vai SnapPROBE™




- ✓ Pārliecinieties, ka zonde un visas tās daļas ir tīras.
- ✓ Izvēlieties vienreizlietojamu ausu uzgali, kas atbilst pacienta ausu kanālam.
- ✓ Pievienojiet ausu uzgali zondei.

Ievietojiet zondi ar ausu uzgali ausī

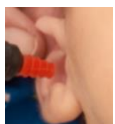

- ✓ Ievietojiet zondi droši bērna ausu kanālā.
- ✓ Pārliecinieties, ka zonde ir ievietota pietiekami dziļi, lai tā neizkristu pārāk viegli.

3 SAGATAVOJIET IERĪCI

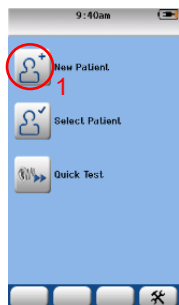


Ieslēdziet ierīci

- ✓ Nospiediet pogu **Home** uz easyScreen, lai to ieslēgtu.

Ievadiet jaunu pacientu


- ✓ Pieskarieties pogai „**New Patient**” (Jauns pacients)  (Pārskatīt pacientu), lai atvērtu datu ievades ekrānu (1).

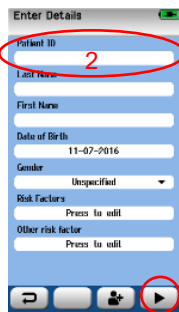

Ievadiet pacienta informāciju

- ✓ Pieskarieties laukiem, lai ievadītu pacienta informāciju.
- ✓ Lai saglabātu pacientu, ir jāievada pacienta identifikācijas numurs (2).
- ✓ Kad nepieciešamie lauki ir aizpildīti, pieskarieties funkcijas taustiņam „**Test**”  (**Testēt un saglabāt**) (3).

4 SĀCIET SKRĪNINGU

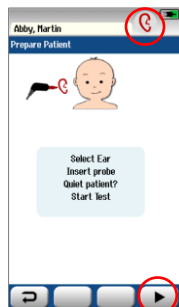

Izvēlieties ausi

- ✓ Kad parādās testa ekrāns, pieskarieties pogai „**Ear**”  (**Ausu** iestatījumi), līdz parādās simbols, kas atbilst ausij, kuru vēlaties pārbaudīt. **Sarkans = labā auss. Zils = kreisā auss.** (4).


Vai bērns ir gatavs?

- ✓ Pagaidiet, līdz bērns ir nomierinājies un ir kluss, pirms sākat testu.

Sāciet skrīningu


- ✓ Pieskarieties pogai „**Test**”  (Sākt pārbaudi), lai sāktu pārbaudi (5).

5 PĀRBAUDES PROCESS – ZONDES PIEMĒROTĪBAS PĀRBAUDE

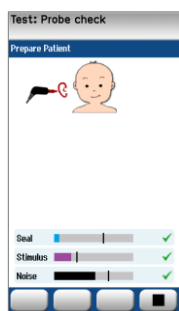

- ✓ Tiek pārbaudīta zondes piemērotība ausu kanālā.
- ✓ Teksts augšējā statusa joslā apraksta zondes piemērotības statusu. Zemāk esošās joslas parāda:
 - ✓ **Hermētiskums** – vai zonde ir droši piestiprināta pie auss kanāla.
 - ✓ **Stimulācija** – vai stimulācija ir atbilstoša.
 - ✓ **Trokšņi** – vai nav pārmērīgs akustiskais troksnis.
- ✓ Ja kāds no parametriem aizmugurē nav atzīmēts ar zaļu ķeksīti, tad:
 - ✓ Pārbaudiet, vai zonde ir droši ievietota ausu kanālā.
 - ✓ Pārbaudiet, vai troksnis telpā un no pacienta ir samazināts.
- ✓ Kad visiem 3 parametriem ir zaļas atzīmes, tests turpināsies nākamajā fāzē.



6 PĀRBAUDES PROCESS – MĒRĪŠANAS FĀZE

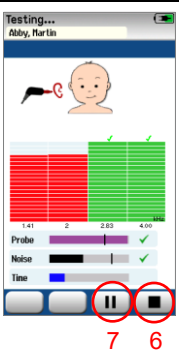

- ✓ Vertikālās joslas katrai frekvencei tiek aizpildītas ar krāsu, testam virzoties uz priekšu.
 - ✓ **Sarkanās** joslas atspoguļo **labās** auss pārbaudes gaitu.
 - ✓ **Zilās** joslas atspoguļo **kreisās** auss pārbaudes gaitu.
 - ✓ Zaļā josla ar atzīmi virs tās atspoguļo izturētu frekvenču joslu.
- ✓ Kad ir izietas 3 frekvences, tests kopumā ir **iziets**, tests tiek pārtraukts un virs grafika parādās zaļš simbols „✓” (Tests iziets).
- ✓ Kad 60 sekundes pagājušas, nekonstatējot OAE (**skatīt**), tests tiek pārtraukts un virs grafika parādās oranžs simbols X.
- ✓ Lai piespiestu pārtraukšanu, izvēlieties funkciju taustiņu „**Stop**” (6). Tiks parādīts simbols, kas norāda uz nepabeigtu testu (?).
- ✓  Lai apturētu mērījumu, izvēlieties funkciju taustiņu „**Pause**” (Pauze) (7). Kad esat gatavs, turpiniet.

7 PĒC TESTA OPCIJAS

Print Label

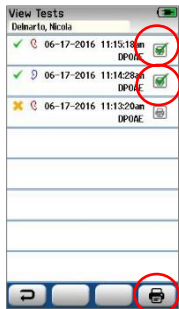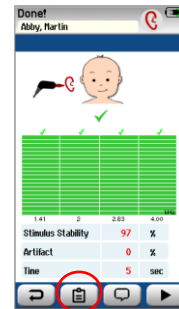

- ✓ Izvēlieties pogu **Test list** (Testa saraksts), lai apskatītu šim pacientam veikto testu sarakstu (8).
- ✓ Pēdējais tests kreisajai un labajai ausij ir iepriekš atlasīts (atzīmēts) drukāšanai. Taču to var atlasīt un izvēlēties citus, pieskaroties printera ikonai testa rindā (9).
- ✓ Pēc izvēles, kurus testus vēlaties izdrukāt, izvēlieties funkciju „**Print**” (pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts) (10).

Atgriezies sākumlapā

- ✓ Nospiediet pogu „**Sākums**”, lai atgrieztos **sākuma** ekrānā un sāktu procesu jaunam pacientam.

Pārsūtīšana uz HearSIM™

- ✓ Pievienojiet easyScreen savam datoram un palaidiet HearSIM™ lietojumprogrammu, lai pārsūtītu pacienta un testa datus pastāvīgai uzglabāšanai. Sīkāku informāciju skatiet HearSIM™ rokasgrāmātā.

Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju vai MAICO Diagnostics GmbH, Sickingerstr. 70-71, 10553 Berlīne, Vācija

Tālrunis: +49 30 70 71 46-50 • E-pasts: sales@maico.biz • WEB: www.maico-diagnostics.com