

Hörscreening für alle Altersgruppen



touchTymp

Unser ALL-TOUCH Tympanometer


Einfach intuitive Mittelohrfunktionstests

Unsere touchTymp-Impedanz-Serie wurde entwickelt, um die Tympanometrie zu einem intuitiven, effizienten und angenehmen Testverfahren zu machen. Optimieren Sie Ihren täglichen Arbeitsablauf mit unserem 10,4-Zoll-Touchscreen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die eine einfache Änderung der Parameter ermöglicht.



*„Ich kann alle Funktionen mit nur
drei Klicks bedienen.
touchTymp ist wirklich erstaunlich intuitiv“
Dr. Michel Bloch, Cannes, Frankreich*



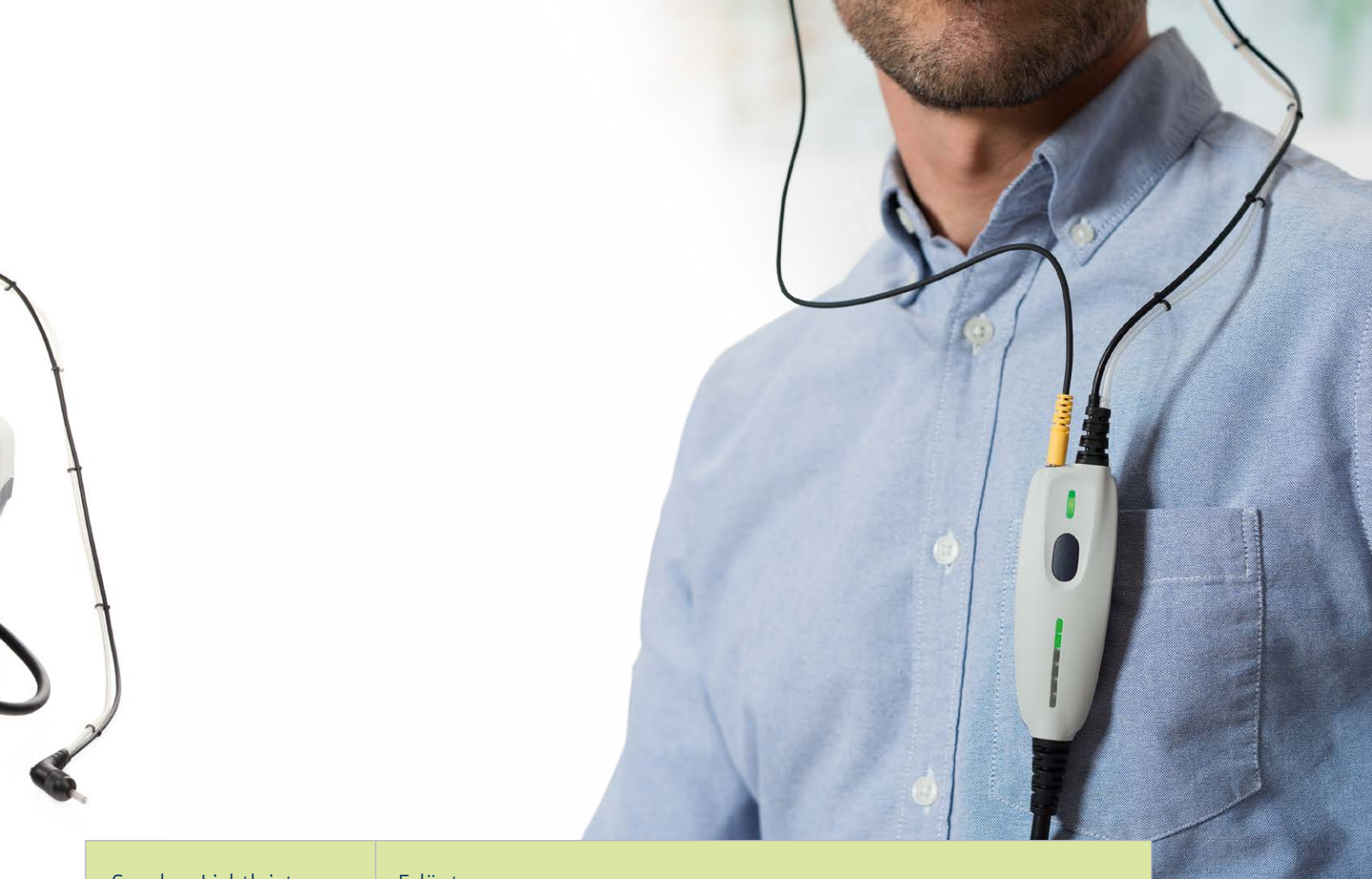

Sonden-Lichtleiste	Erläuterung	
	Tympanometrie & Akustischer Reflex	Zeigt Ergebnis an: Auffällig
	Tympanometrie & Akustischer Reflex	Ergebnis: Unauffällig
	Akustische Reflexe	Stimulus wird präsentiert (zusätzlich wird das letzte Ergebnis angezeigt)
	Tympanometrie	Leuchtet (aufsteigend) je nach Werten (Normbox)

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Patienten


Erleben Sie die volle Kontrolle über die Sonde, während Sie sich auf Ihren Patienten konzentrieren. Die ergonomischen Screening-Sonden informieren mittels Leuchtdioden über das gewählte Ohr, die Qualität der Sondenposition und das Messergebnis. Während der Messung wird zusätzlich der Messverlauf in Echtzeit auf der integrierten Leuchtleiste angezeigt.

Die unterschiedlichen Versionen des touchTYP sind mit den passenden Sonden für Ihre spezifischen Anforderungen ausgestattet. Das touchTYP MI 24 und touchTYP MI 26 bieten eine ergonomische Messsonde für Screeningtests. Das touchTYP MI 34 und touchTYP MI 36 verfügen über eine leichte Diagnostiksonde für Screening und Diagnostik, die Sie einfach am Oberarm Ihres Patienten befestigen.




Audiometrie auf kleinstem Raum

Unsere Modelle touchTymp MI 26 und touchTymp MI 36 vereinen intuitive Tympanometrie und Audiometrie in einem einzigen, herausragenden Gerät. Dank ihrer kompakten Bauweise eignen sie sich perfekt für beengte Platzverhältnisse auf dem Schreibtisch, und die Möglichkeit, einfach und nahtlos zwischen den Tests zu wechseln, macht Ihre Arbeitsabläufe wesentlich effizienter und komfortabler.

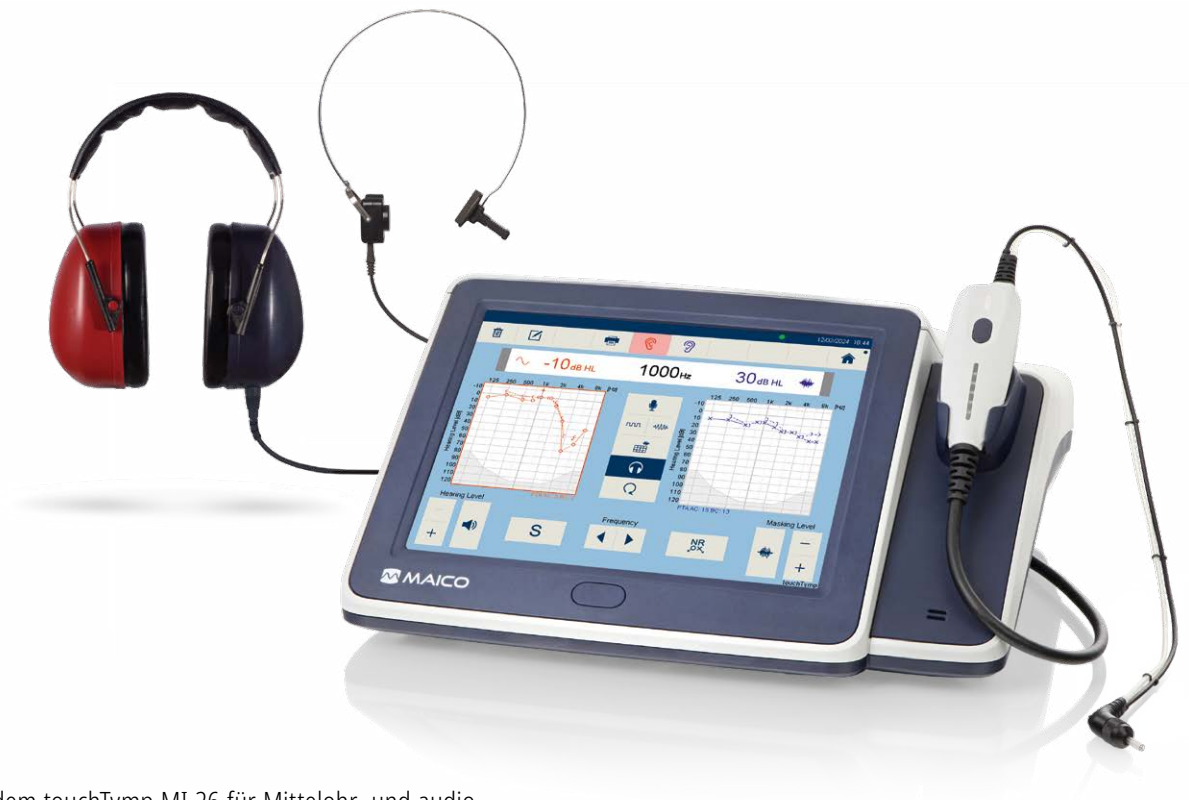

Wählen Sie zwischen dem touchTymp MI 26 für Mittelohr- und audiometrische Screenings oder dem touchTymp MI 36 für erweiterte Diagnosefunktionen. Zusätzlich zur Luftleitungsaudiometrie bietet das touchTymp MI 36 auch Knochenleitungsaudiometrie, die für das touchTymp MI 26 als optionale Funktion erhältlich ist.

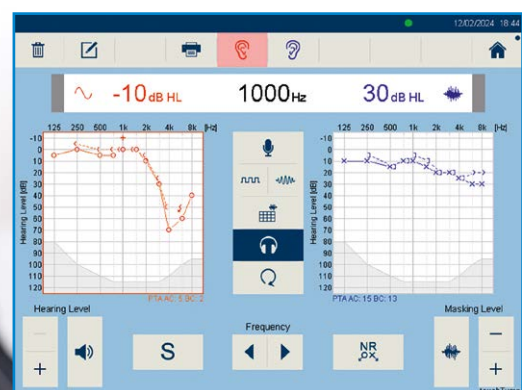

Tympanometrie für Kinder war noch nie so spannend

So wird die Impedanzmessung schnell und einfach: Während das Kind auf der Touchscreen-Oberfläche eine Rennauto-Animation verfolgt, verläuft die Messung im Hintergrund. Weil sich der kleine Patient auf das spannende Autorennen konzentriert, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Ohrstöpsel sich löst oder das Kind den Kopf bewegt und Sie den Test wiederholen müssen. Dadurch sparen Sie Zeit und Aufwand.



Das Autorennen beginnt, sobald der Test startet. Sobald die Messung abgeschlossen ist, erreicht das Auto die Ziellinie und der Patient hat das Rennen gewonnen.



Umfassende Testprotokolle

Jedes touchTymp bietet umfassende Standardprotokolle für die sofortige Durchführung von Screening- und Diagnosetests:

Tests	touchTymp			
	MI 24	MI 26	MI 34	MI 36
Tympanometrie				
226 Hz	✓	✓	✓	✓
678 Hz, 800 Hz			✓	✓
1000 Hz	optionales Upgrade	optionales Upgrade	optionales Upgrade	optionales Upgrade
RaceCar-Animation 	✓	✓	✓	✓
Akustische Reflexe				
Fest (Screening)	✓	✓	✓	✓
Automatisch (Schwellenwert)	✓	✓	✓	✓
Ipsilateral	✓	✓	✓	✓
Kontralateral	optionales Upgrade	optionales Upgrade	✓	✓
Reinton	✓	✓	✓	✓
Geräusch			✓	✓
RaceCar-Animation 	✓	✓	✓	✓
Reflex Decay				
Ipsilateral / Kontralateral			✓	✓
ETF				
ETF intakt / perforiert			✓	✓
Audiometrie				
Reinton + Wobbelton		✓		✓
Luftleitung		✓		✓
Knochenleitung		optionales Upgrade		✓
Maskierung		✓		✓




Sessions PC-Software

Das touchTymp wird von Sessions voll unterstützt. Ihre Daten werden genauso angezeigt wie auf dem Gerät, wodurch ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild gewährleistet ist. Für unser touchTymp synchronisiert Sessions automatisch die Messungen und sorgt so für eine nahtlose Übertragung Ihrer Messergebnisse. Mit Sessions können Sie die Messdaten ansehen, archivieren, verwalten und Berichte drucken. Die übersichtliche, symbolbasierte Benutzeroberfläche ermöglicht einen effizienten Arbeitsablauf und ein schnelles Datenmanagement. Sie können Sessions bei voller Kompatibilität mit Ihrer Datenbank als Stand-alone-Lösung betreiben, oder Sie integrieren die Messergebnisse über Schnittstellen einfach in Ihre gewählte EMR-/ EHR-Lösung. Alternativ können Sie die Messergebnisse auch ohne OtoAccess® Datenbank als reines PDF-Dokument speichern, per E-Mail versenden sowie direkt ausdrucken.



Mittelohruntersuchungen für alle Altersgruppen

Sie und Ihre Patienten sind vielfältig – genau wie unser touchTymp. touchTymp ist auf die Bedürfnisse aller Altersgruppen zugeschnitten. Führen Sie Vorsorge- und Diagnostiktests durch, vom Säugling bis hin zu Senioren aus.

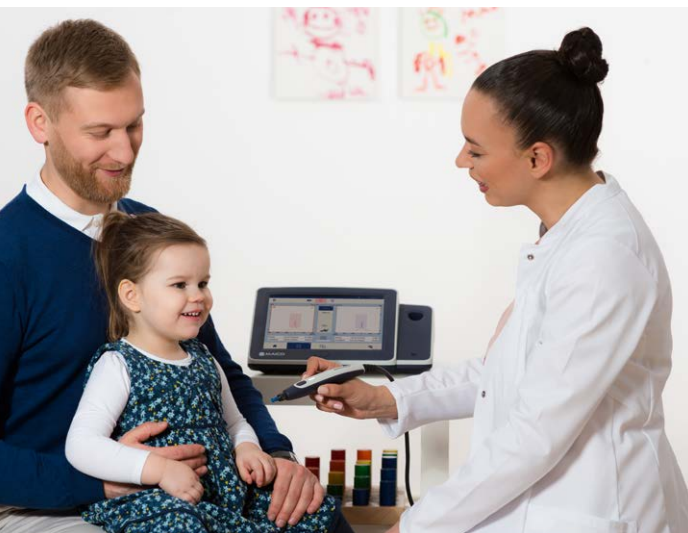

Drucken leicht gemacht

Sparen Sie Zeit mit dem integrierten Drucker des touchTymp: Stecken Sie die Sonde einfach in ihre Halterung zurück, um den automatischen Druckvorgang der Testergebnisse und Berichte zu starten.




touchTymp – Komponenten, Zubehör & Software



touchTymp MI 24,
touchTymp MI 26
mit Messsonde




touchTymp MI 34,
touchTymp MI 36
mit Diagnostiksonde

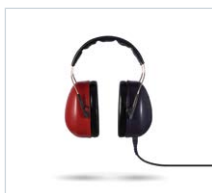


LL-Kopfhörer
DD65 v2




KL-Kopfhörer B71

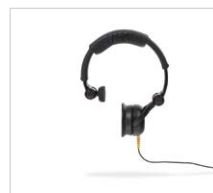

Kontra-Kopfhörer
DD45C

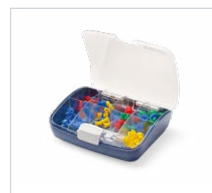

Ohrstöpsel-Box

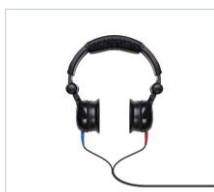

LL-Kopfhörer
DD45



Talkback-Mikrofon



Monitor-Headset
mit Mikrofon




Sessions
PC-Software

Die Standardkonfiguration variiert je nach gewählter touchTymp-Version.

Disposables

Sanibel™ Supply ist der exklusive Lieferant von MAICO touchTymp-Einwegartikeln. Verwenden Sie ausschließlich Sanibel™-Einwegartikel, um optimale Testergebnisse zu erzielen.

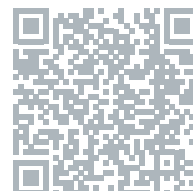

Sehen Sie sich
unsere touchTymp-
Videos an.



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Deutschland
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz



Finden Sie Ihren lokalen Händler.



07/2025