

Før måling påbegyndes

Tænd instrumentet ved at trykke på enten den røde eller blå pil.



Hvis instrumentet står i en cradle/holder, tændes det automatisk, når det tages ud af cradlen/holderen.

Håndtering af ørepropper

Vælg en øreprop af passende størrelse, afhængigt af størrelsen og formen af øregangen og øret. Placer øreproppen på probens spids.

Skærm



Funktionstaster:

Øverste taster: Funktionen af de enkelte taster er relateret til teksten i displayet over den enkelte tast. (F.eks. Select Test, Patient, Stop)



Pile taster: Tænd easyTymp ved at trykke på enten venstre eller højre pil.

Sluk easyTymp ved at trykke på begge pile samtidig.



Op og ned-taster: Rul gennem de forskellige menuer, testprotokoller eller op og ned i skærmen.

Start Test

easyTymp vil altid starte med at vise test-skærmen klar til at starte en måling. easyTymp vil anvende same testprotokol som er anvendt ved sidste måling.

Når man aktiverer test-skærmen, vil den anden linie vise den protokol, der er aktiveret.

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

Select Test

Aktiverer skærmen med tilgængelige testprotokoller.

Patient

På denne funktion, kan du gemme data på en patient, som du kan have overført fra din patientdatabase eller du kan gemme data på en ny patient.

Stop


Tryk stop for at afslutte målingen.

easyTymp vil automatisk skifte til Done på skærmen, når testen er gennemført.

Skærm

Test: Ready

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

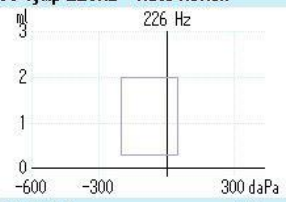

Volume ml

Compliance ml

Pressure daPa

Gradient daPa

Select Test Patient Stop

Tryk Test for at skifte til en anden protokol.

Tryk Patient for at se patientlisten.

Select Test

01 Tymp 226Hz

02 Tymp 1kHz

03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

04 Tymp 226Hz + Reflex 90dB

05 Tymp 1kHz + Auto Reflex

06 Tymp 1kHz + Reflex 80dB WB

easyTymp Select

Rul op / ned for at vælge ønsket test og tryk Select for at starte målingen

View Patients

☐ Andy Andrews

☒ John Doe

☐ Dick Solomon

Back Details Result

Rul op / ned for at vælge en patient.


Vælg Result for at vise de gemte målinger.

Gennemgang af målinger

easyTymp viser automatisk Done på skærmen, når teten er gennemført. Når Done vises på skærmen, kan man vælge at se målingerne fra begge ører. Man kan vælge at printe og/eller gemme.

Done!

Tympanogram

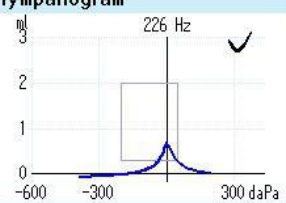

Volume 1.65 ml

Compliance 0.67 ml

Pressure -1 daPa

Gradient 69 daPa

Print Save Delete

Rul ned for at vise refleksmålingerne (ikke mulig på enheder uden refleksfunktion)

Select Pat. & Save

☐ New Patient: Number 4

☒ Andy Andrews

☒ John Doe

☒ Dick Solomon

Back Edit New Save

Gem data på en eksisterende eller på en ny patient.

Edit New

ID

First Name

Last Name

Birth Date DD:MM:YYYY

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - *

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Save Select Next

Naviger i op- og ned-knapperne for at vælge karakterer. Når man aktiverer fødselsdato-feltet, skiftes der automatisk til numeriske værdier.